

Robusta och starka

VAD FÅR JAG NÄR JAG BESTÄLLER QUICK RELEASE AXEL?

- 1 Axel i önskad storleken
- QR-Axel med eller utan hatt
- 1 års garanti

Checklista för att beställa


- För att få rätt längd se ritning på höger sida
- Välj rätt axel som passar önskad längd
- Välj mellan hatt eller utan hatt
- Beställa önskade QR-axlar



Välkommen att kontakta oss
på telefon 0345 - 408 80
eller info@decon.se

ALLMÄN INFORMATION

QR med hatt

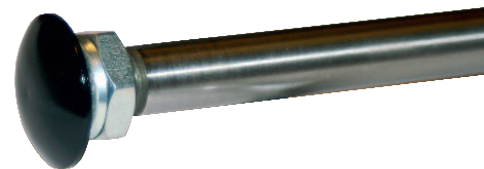

QR utan hatt



1 VAL AV RÄTT AXEL

Med placeringen av andra hjul på en rullstol, måste ofta axlarna också bytas ut. Att välja rätt axlar är viktigt.

Figuren nedan visar hur enkelt du kan bestämma rätt längd till nya axlar.

Dimension A är rullstolens axelhylsa eller hylsa i adapterplattan.

Måttet B är den yttre diametern av de två hjullagren.


Om du lägger ihop dessa två dimensioner, har du rätt storlek för längd på nya axlar.

Exempel:

A storlek är 56 mm. B storlek är 50 mm. Längden på axel du behöver är 56 mm + 50 mm = 106 mm.

Rätt val till 12,0 mm axel med hatt är QR1203.

I vårt sortiment kan du välja axlar med tjockleken 12,0 eller 12,7 mm och med eller utan hatt.

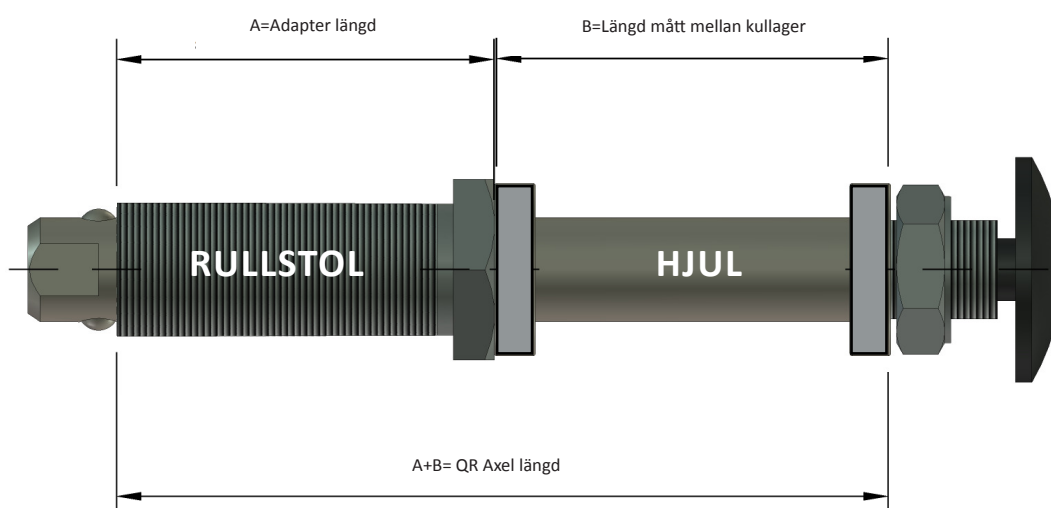

Artikelnummer	12,0 mm	12,7 mm
(A+B) Längd i mm	Svart hatt	Svart hatt
82-85	X	QR1270
96-99	QR1201	QR1271
101-104	QR1202	QR1272
105-108	QR1203	QR1273
109-112	QR1206	QR1275
113-116	QR1207	QR1276
117-120	QR1196	QR1195
121-124	QR1204	QR1274
125-128	QR1198	QR1278
129-132	QR1209	QR1277
133-136	X	QR1277-1