



Vad skall man beakta under utprovning av E-Walk?

- Kontrollera så att e-walk sitter rätt i sitt fäste.
- Kontrollera så att du har minst 6" länkhjul på rullstolen
- Demontera e-walk ifrån rullstolen genom att följa instruktionerna på e-walk:ens lock
- Montera e-walk på rullstolen genom att följa instruktionerna på e-walk:ens lock.
- Upprepa steg 2 och 3 tills du känner dig bekväm med detta.
- Montera körreglaget i en bekväm position för användaren och gå igenom dem olika knapparna och reglagen så användaren känner sig komfortabel med funktionerna.
- Fäll ner drivhjulen enligt instruktionerna på locket.
- Tryck på strömställaren på körreglaget (av/på) till läge på och testkör på låg hastighet på plant underlag utan hinder.
- Testkör nu i olika miljöer, typ trottoarer/rampkörning osv. OBS. Viktigt att man kör rampkörning och får lära sig att hantera e-walk som kan kännas tippig (bakåt) och kan upplevas obehagligt första gången.
- Gå igenom hur batteriladdningen fungerar.
- Följ checklistan vid beställning.