



**Monteringsanvisning Etac Cross, Cross XL, Twin
MEM6001P och MEM6002P**

1. Demontera hjulens nav med bromsar på båda sidorna.

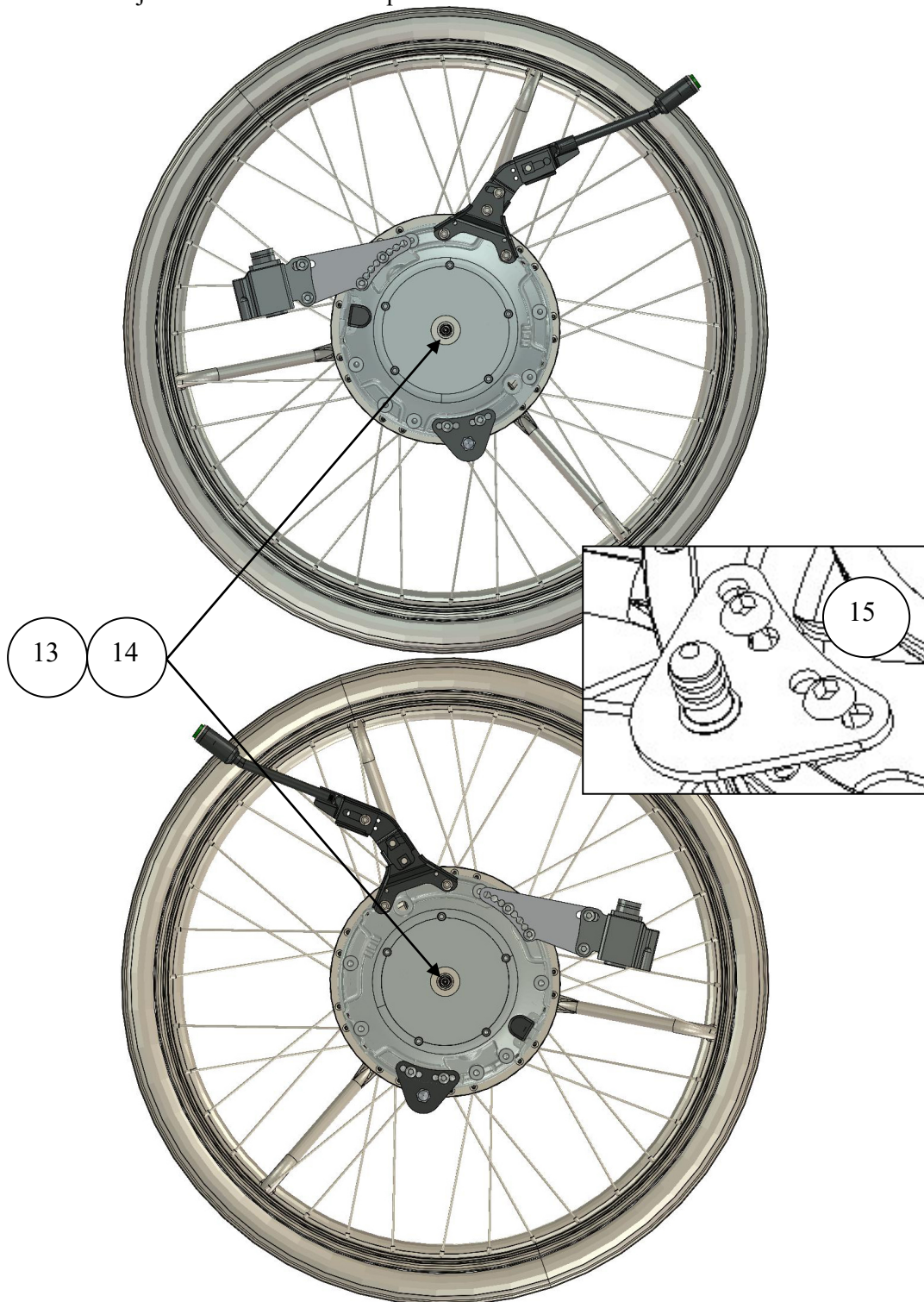

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
- Axel Ø12 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.
 - Stopp pinne är monterat med Detalj nummer: 320003.

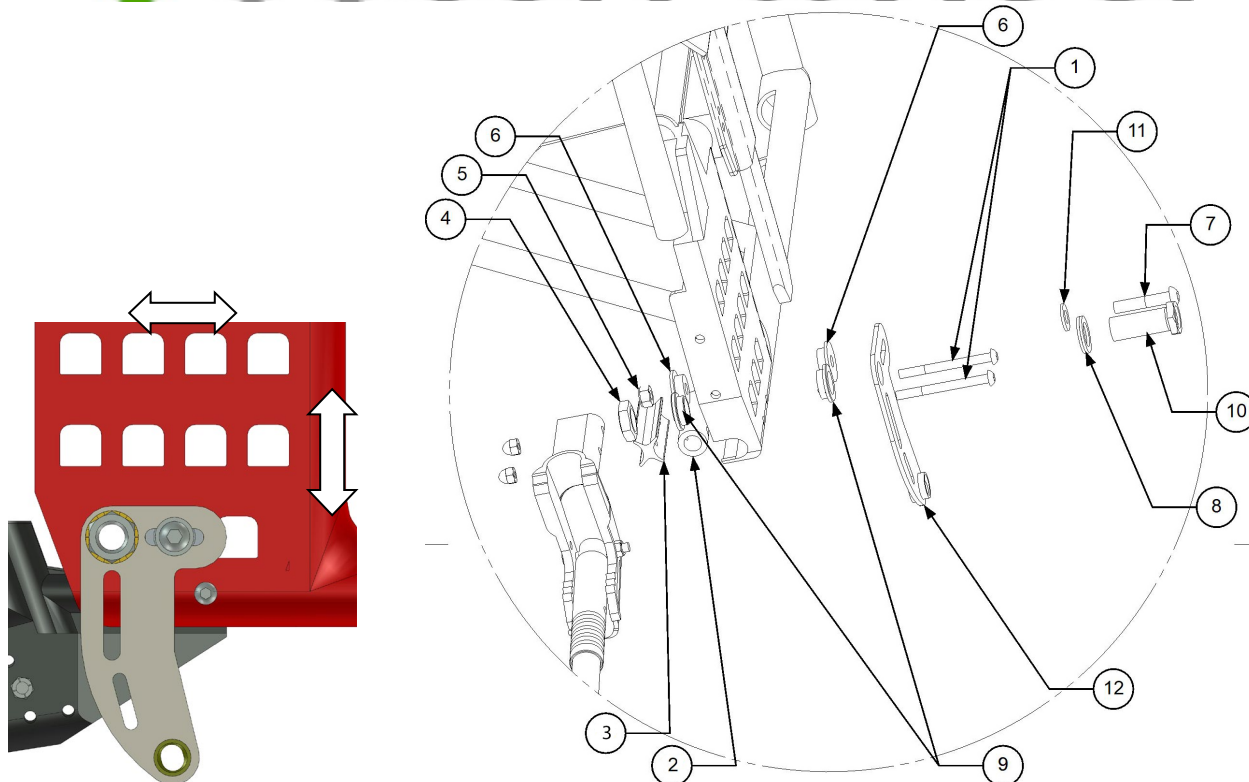


3. Montera nu fästet enligt bilden ovan. Placeringsalternativ finns.
Se bild som visar montering av fästet och inflyttning av tippskyddet på höger sida.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM6X45/XSM6X65	2	Skruv M6 x 45/65
2	80745-1	1	Rör
3	80745	1	Distans profil
4	XSM16M	1	Mutter M16X1 Låg
5	XSM8LM	1	Låsmutter M8
6	280008	2	Distans
7	XSM8X40	1	Skruv M8 x 40
8	405239	1	Nordlock Bricka
9	BR1100-03	2	Distans
10	HW063	1	Navhylsa
11	XSM8BR	1	Planbricka M8
12	310022	1	Fäste
13	XOE-25383-00	1	Distans 12
14	93440-120520	1	Spårring
15	320003	1	Fäste

OBS! Vid separat köp av monteringsatts medföljer ej axel, axeldistans eller spårring, för byte se servicebok.

4. Montera nu den rygghängda batteriväskan.

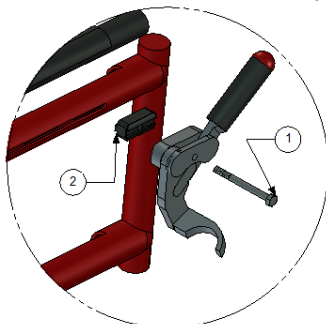

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	X6SM6X65	1	Bult M6 x 65
2	50393	1	Distans

Åtdragningsmoment / Tightening torque

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsa.
Sleeve.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm