

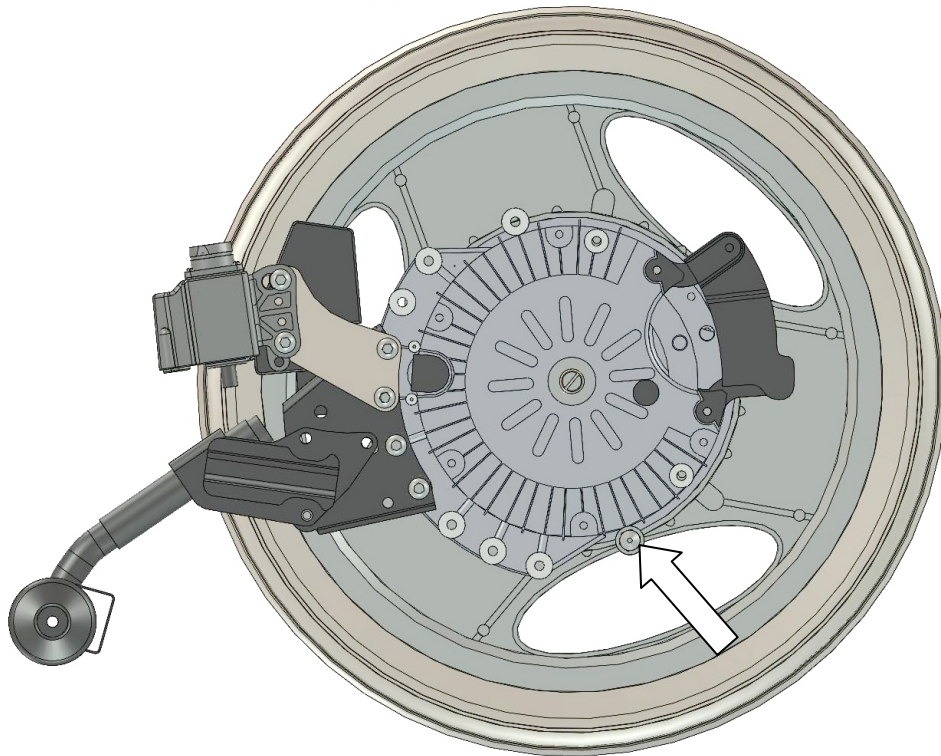


Monterings anvisning för Flipper Pro Flex MED3308

1. Demontera hjulen, broms och navhylsan på båda sidorna samt tippskydd.

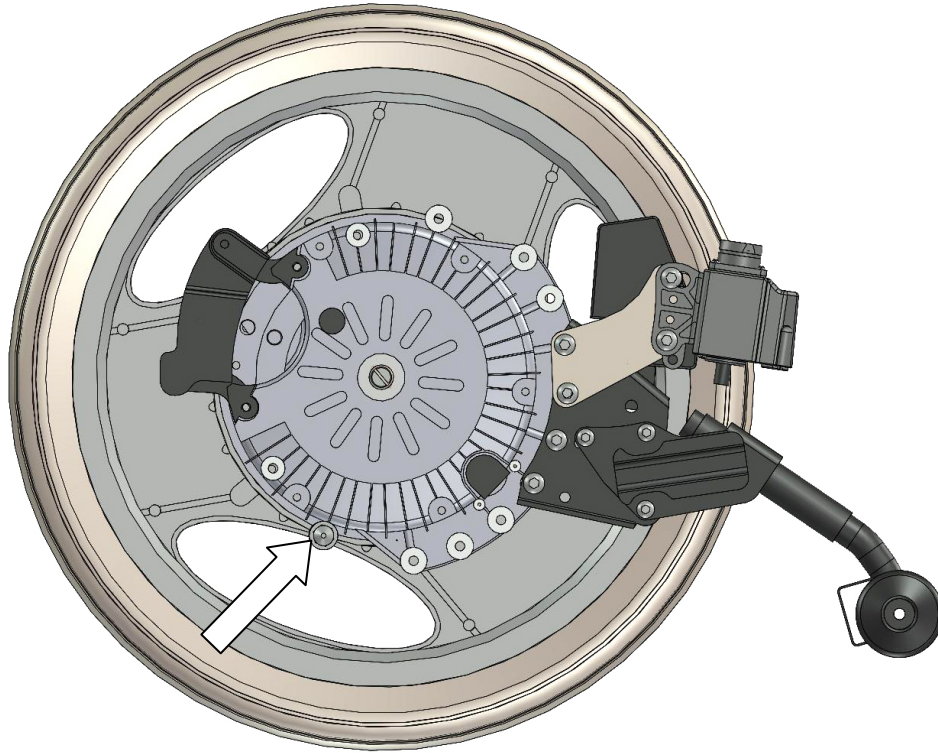

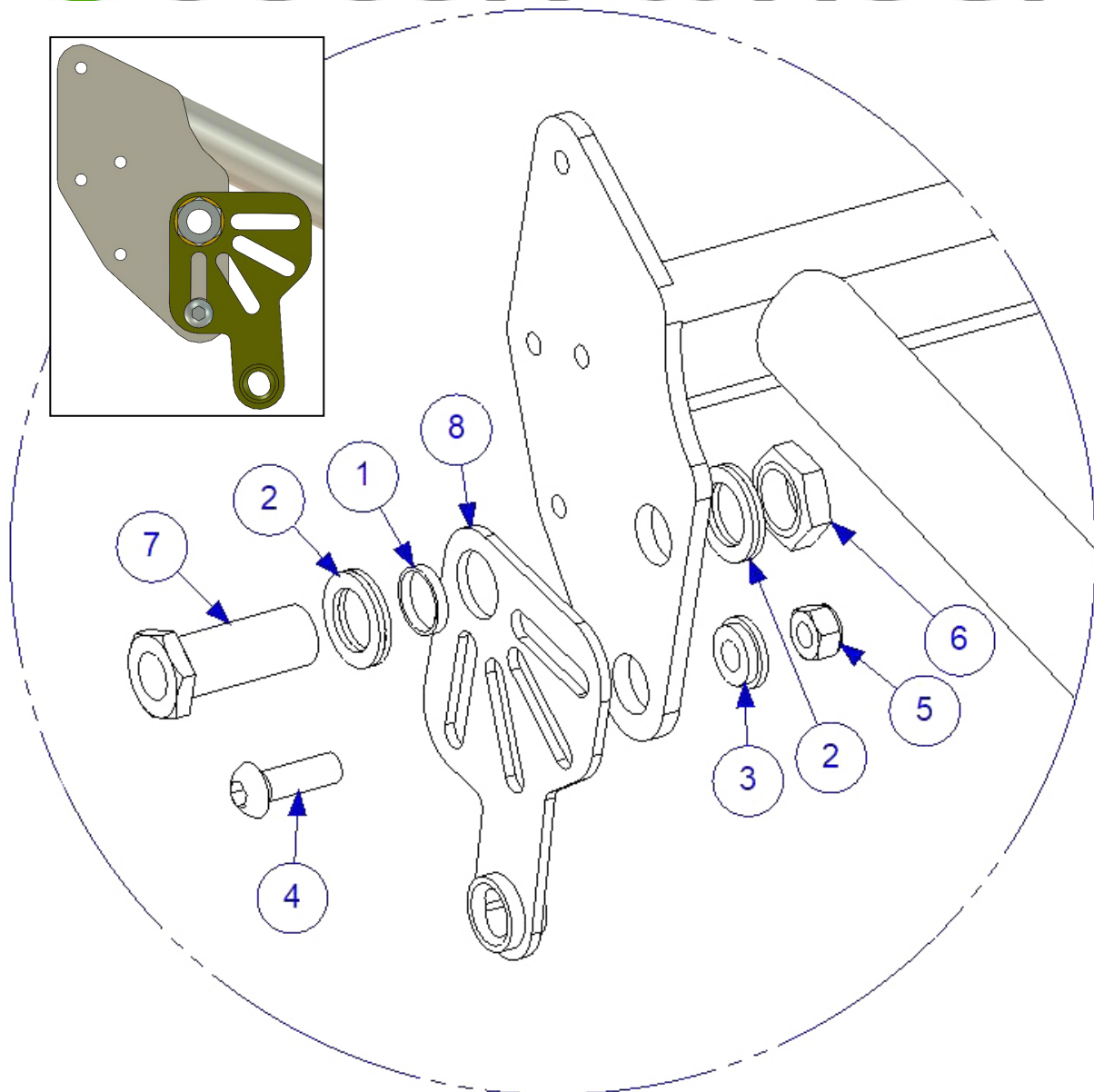

2. Montera nu fästet. Bilderna ovan visar montering av fästet på höger sida.
För montering på en sida, så skall följande ingå.


Placering	Art. Nr:	Antal	Beskrivning
1	100 400 017	1	Distans
2	405239	2	Nordlock Bricka M16
3	100 400 007	1	Distans
4	XSM8X25	1	Skruv Rundad M8 x 25
5	XSM8ML	1	Låsmutter M8
6	XSM16M	1	Mutter M16X1 Låg
7	HW069	1	Navhylsa M16x1/12,7
8	MED2004	1	Fäste



3. Montera nu den rygghängda batteri väskan. Se bilden ovan för en alternativ placering.
4. På bilden ovan ser ni även hur man skulle kunna fästa Simplex handtaget.

MED1389

5. Montering av joysticken på handtaget.

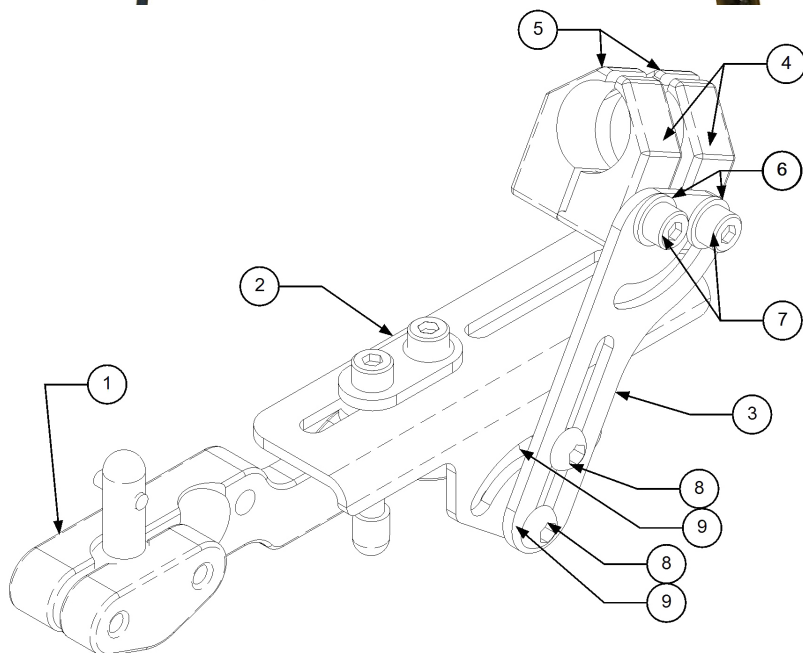

Följande detaljer ingår.

Placering.	Artikel nummer	Antal	Beskrivning
1	XA2-48160-B0	1	Övre hållare 2
2	XA2-46295-00	1	Fäste
3	MED1388	1	Fäste
4	XA2-2612E-00	2	Klamma med hål
5	XA2-2612K-00	2	Klamma med gänga
6	XSM6BR	2	Planbricka M6
7	MC6SM6X35	2	Skruv Cylindrisk M6 x 35
8	XSM6X16	2	Skruv Rundad M6 x 16
9	XSM6ML	2	Låsmutter M6

MED1223

6. Montering av vårdar styrning på handtaget.



OBS! Bilden visar Seabass montering.

Placering.	Artikel nummer	Antal	Beskrivning
1	XA2-2612E-00	1	Fäste
2	XA2-2612K-00	1	Fäste2
3	91902-06200	1	Plan Bricka
4	91312-06050	1	Skruv M6



Placering.	Artikel nummer	Antal	Beskrivning
1	XOC-48321-01	1	Kabel (ingår ej)

Åtdragningsmoment / Tightening torque

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Sleeves.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm