


decon wheel

Monteringsanvisning för Easywheel, Etac Cross 5 och Cross 5XL VH3010-73

1. Demontera originalhjulen och navhylsorna på båda sidorna.
2. Montera de nya navhylsorna passande Easywheel i befintliga passdelar.

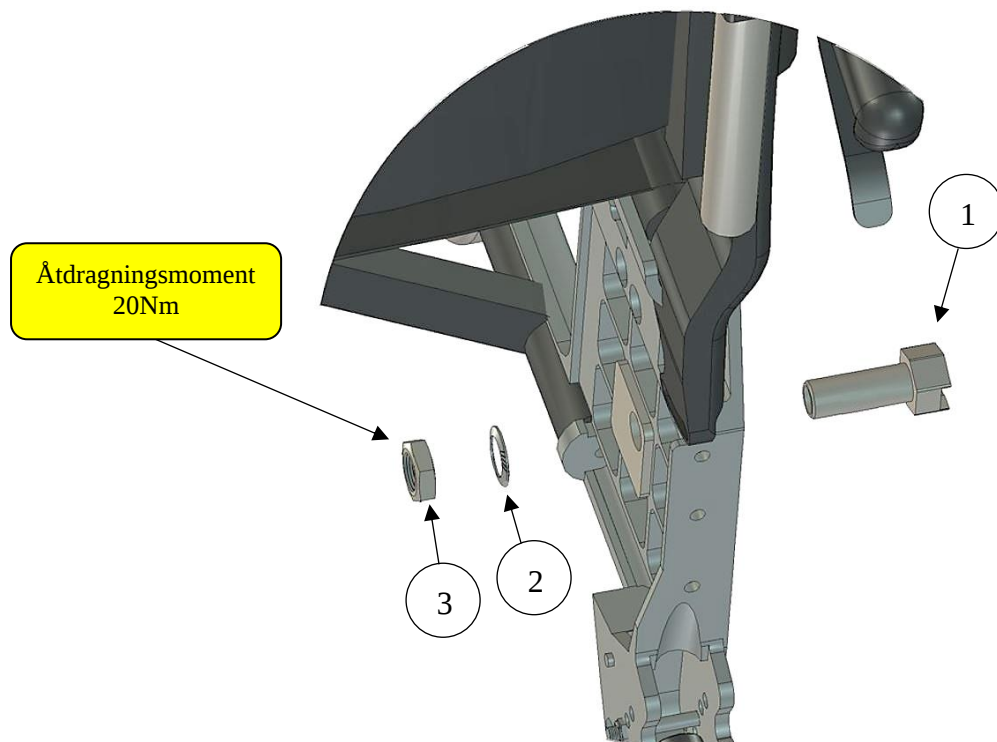

3. Detaljer för montering på en sida.

Placering	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	VH51001-04	1	Navhylsa
2	XSM16M	1	Mutter M16x1 låg
3	405242	1	Låsbricka M16

4. Samtliga positioner i nedan illustration är tillgängliga.

