



Monteringsanvisning för E-Drive, Etac Cross 5 och Cross 5 XL MED3100

1. Demontera originalhjulen och navhylsorna på båda sidorna.

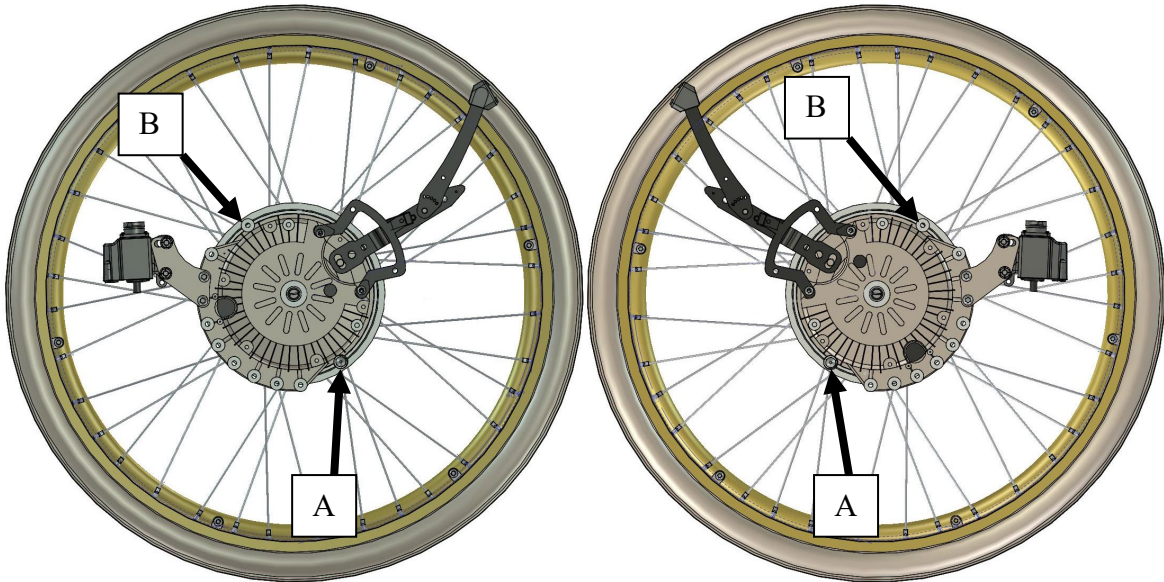


2. Kontrollera att stopp pinnen utan bricka sitter enligt bilder ovan, samt att tippskydd är demonterat.

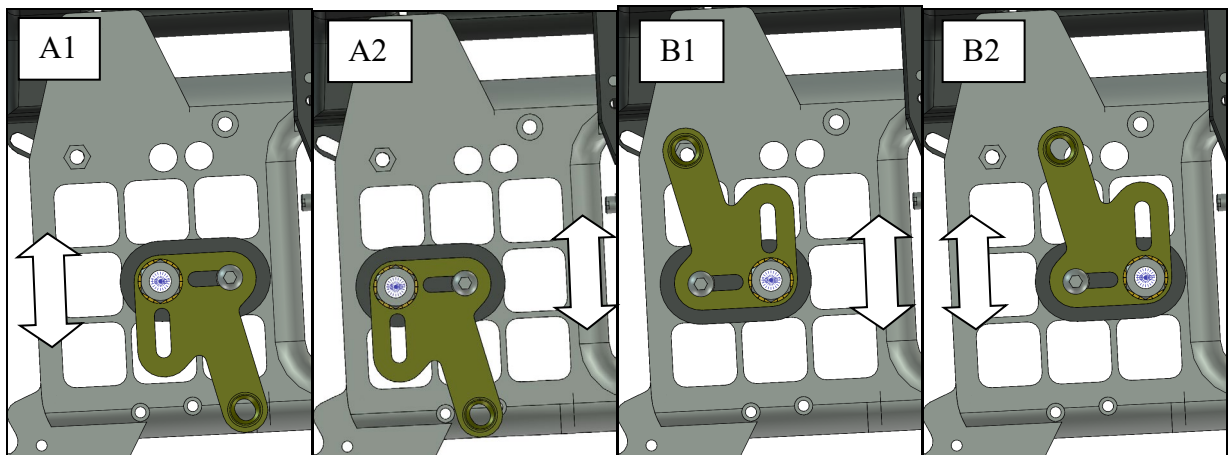


3. Montera nu fästet enligt bilderna ovan.
4. Placeringsalternativ:
Navhylsan går att montera i alla positioner, dock enbart i centrum av respektive hål.

Prioriteras minimal stolsbredd kan denna minskas med totalt 8mm men förutsätter nedan:


1. Fästet (detalj 1) monteras enligt alternativ A, pekandes nedåt.
2. Distanser (detalj 6 och 7) monteras ej.
3. Stopp pinnen kortas enligt bild och monteras utan bricka.

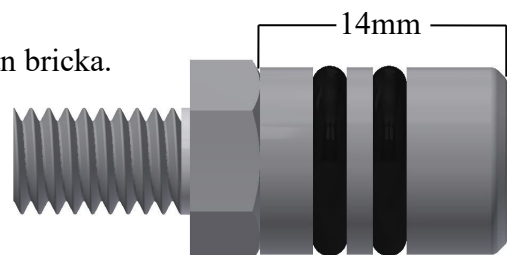

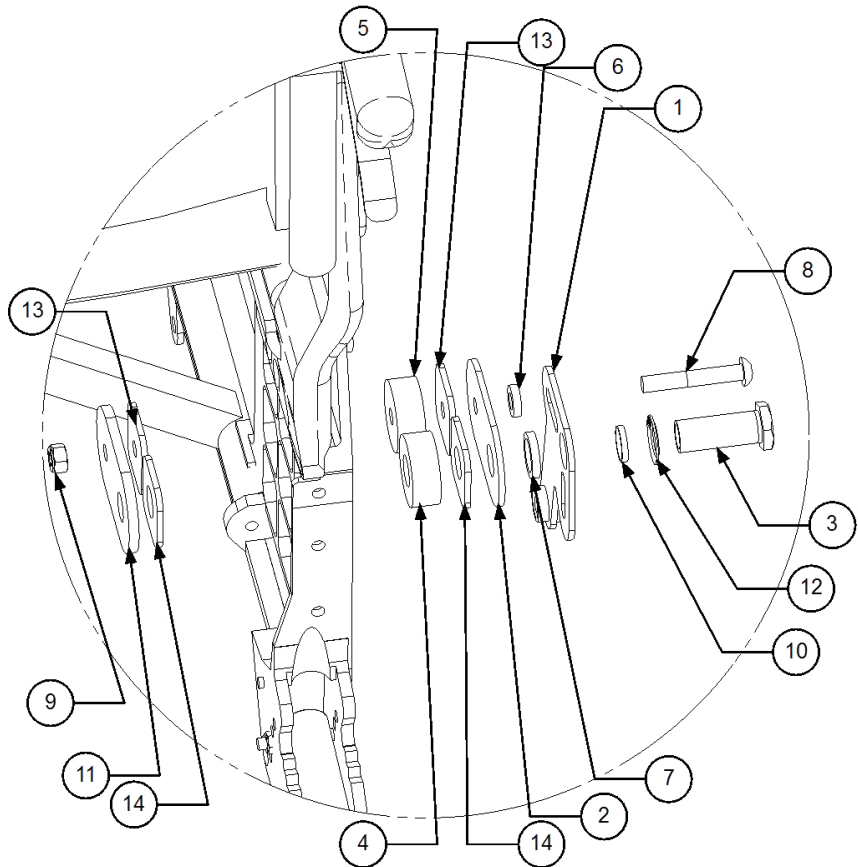


5. Detaljer för montering på en sida.

Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	MED2000	1	Fäste
2	MED3100-01	1	Plate Cross5
3	HW069	1	Navhylsa 16mm
4	100 400 084	1	Distans Cross5
5	100 400 083	1	Distans Cross5
6	100 400 001	1	Distans
7	100 400 004	1	Distans
8	XSM8X45	1	Skruv Rundad M8 x 45
9	XSM8ML	1	Låsmutter M8
10	100 400 017	1	Distans
11	MED3100-02	1	Platta Cross5
12	405242	1	Låsbricka M16
13	MED3100-03	2	Distans Platta
14	MED3100-04	2	Distans Platta

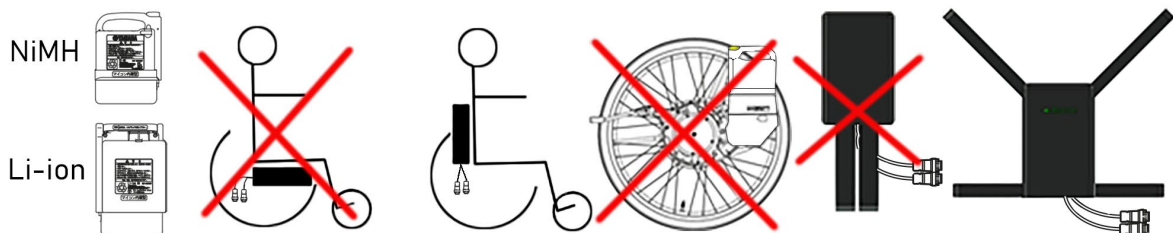


MED1348, MED1348L

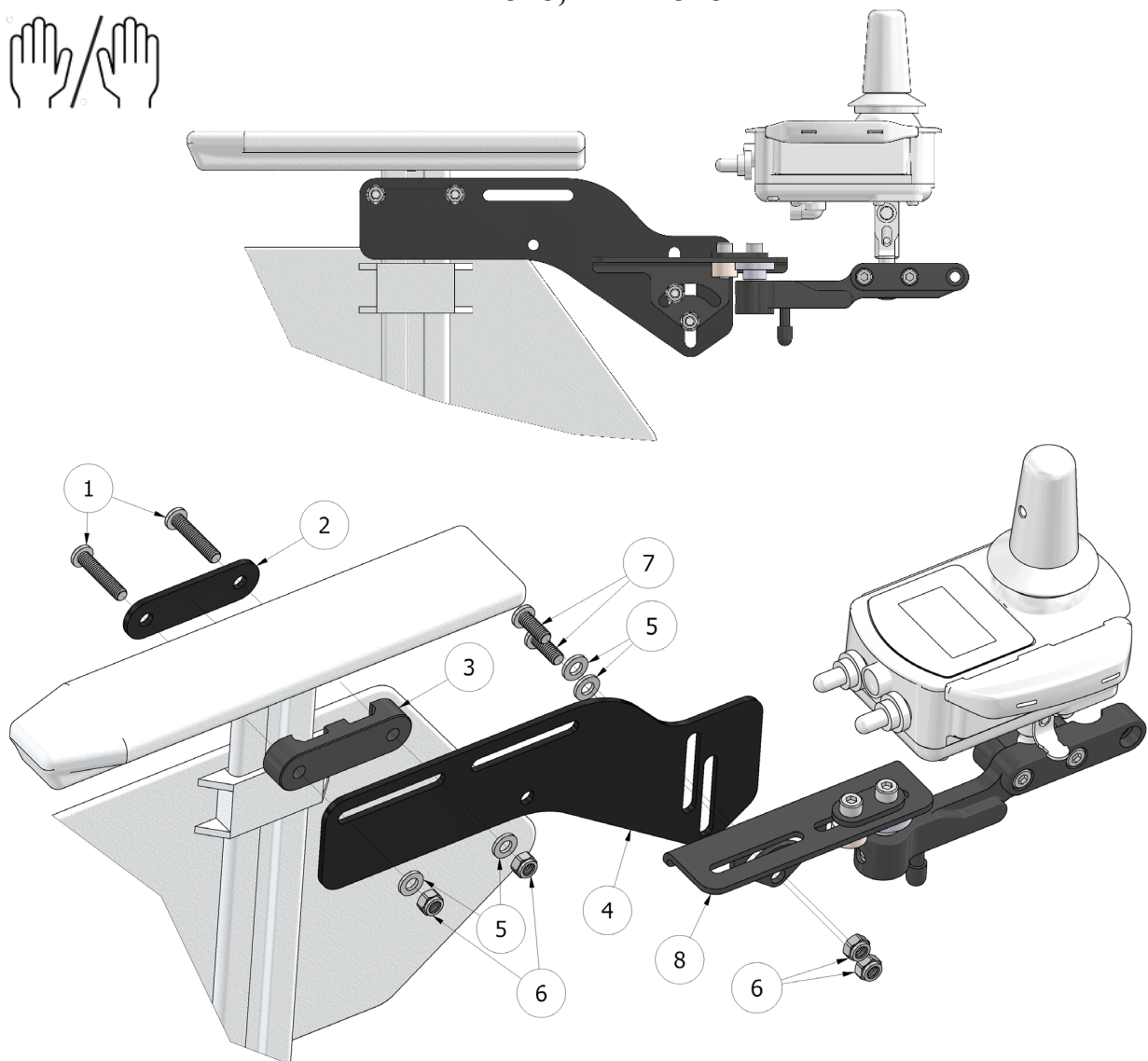


1	XSM6X30	2		
2	MED1547	1		
3	MED4078	1		
4	MED1501	1		(MED1348)
4	MED1482	1		(MED1348L)
5	XSM6BR	4		
6	XSM6ML	4		
7	XSM6X16	2		
8	XOC-48160-B0	1		

MED1644, MED1644L

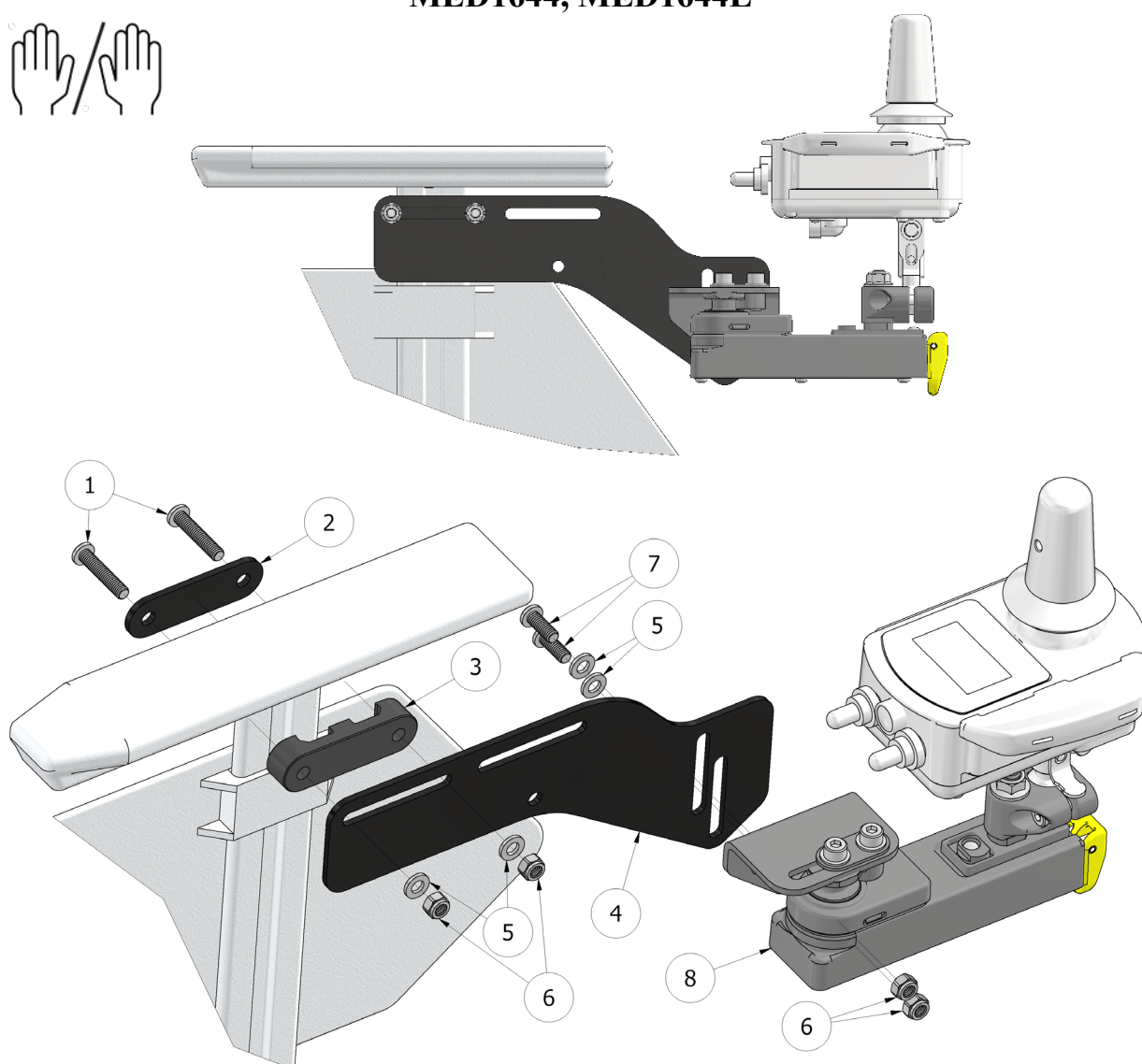


1	XSM6X30	2		
2	MED1547	1		
3	MED4078	1		
4	MED1501	1		(MED1644)
4	MED1482	1		(MED1644L)
5	XSM6BR	4		
6	XSM6ML	4		
7	XSM6X16	2		
8	X0F-48160-D00	1		

MED1356

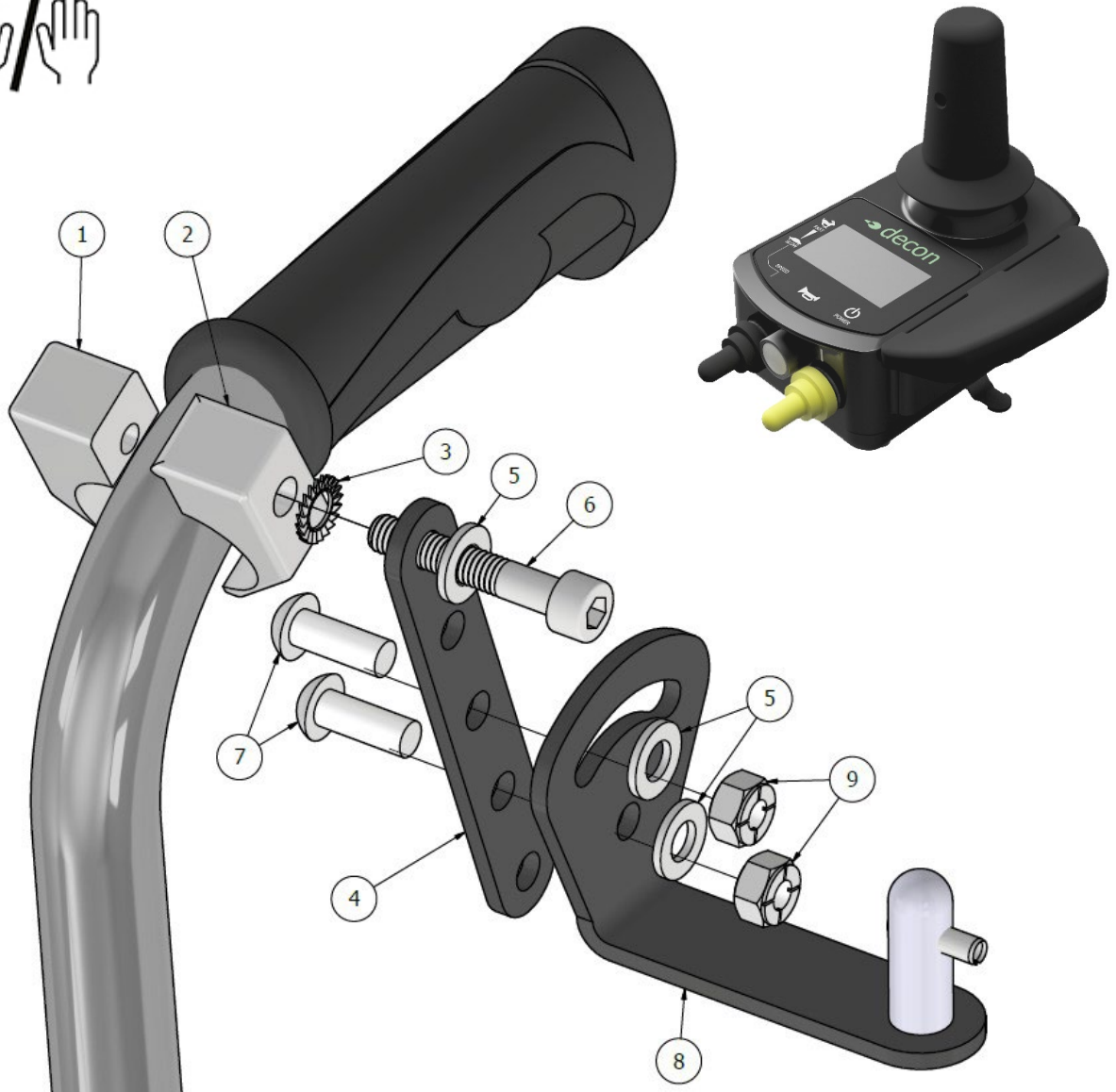

1	XA2-2612K-00	1	
2	XA2-2612E-00	1	
3	XSM6BRTG	1	
4	MED1317	1	
5	XSM6BR	3	
6	MC6SM6X35	1	
7	XSM6X16	2	
8	MED1316	1	
9	XSM6ML	2	

MED1218

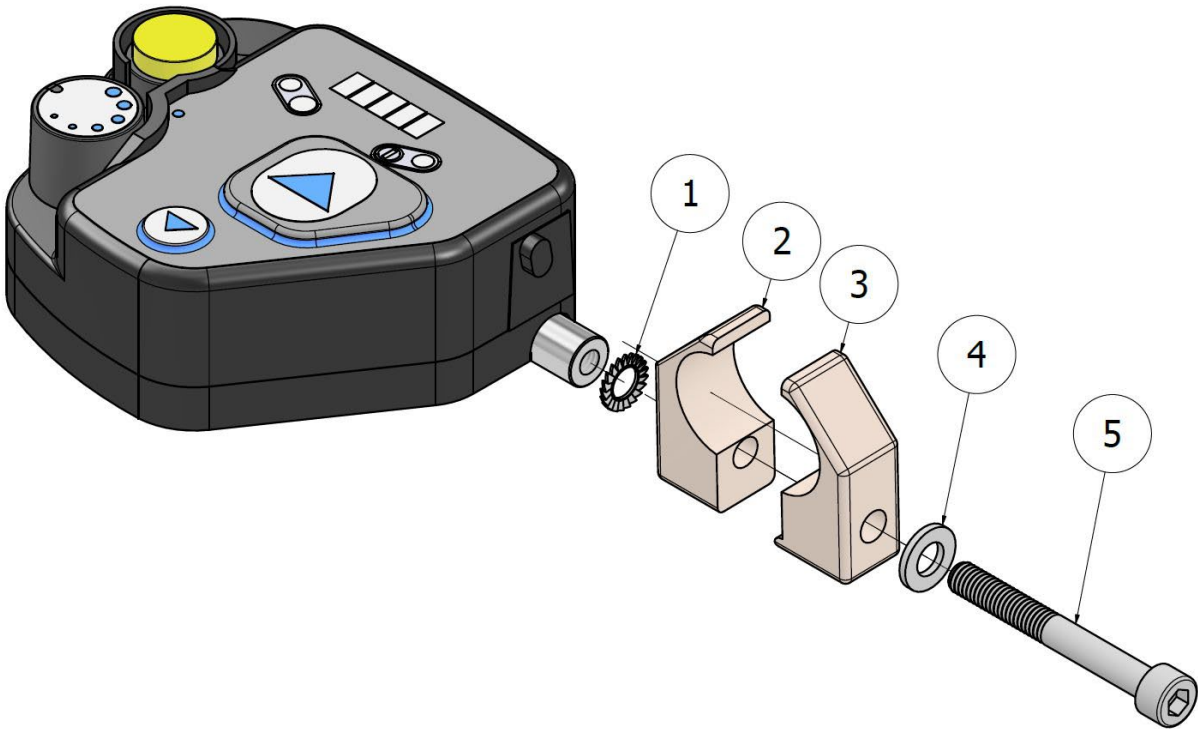


1	XSM6BRTG	1	
2	XOD-2612K-00	1	
3	XA2-2612E-00	1	
4	XSM6BR	1	
5	MC6SM6X50	1	



MED1218 + MED1643

MED1643

Vårdastyrningen är även möjlig att montera på vänstersida. För detta behöver man komplettera med MED1643, vilken beställs separat.

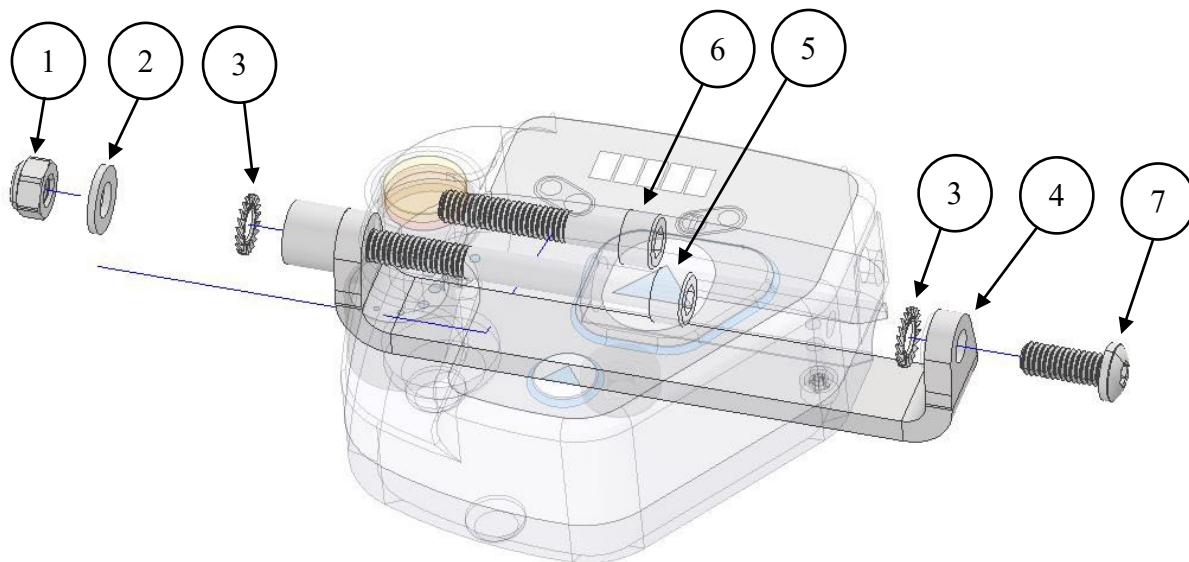

Använd antingen bult med placering 4 eller 5 beroende på vilken klämma som monterats på stolens handtagsrör. Den kortare passar plåtklämman och den gängade aluminiumklämman, den längre aluminiumklämman utan gängor.


Placering.	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	XSM6M	1	Låsmutter M6
2	XSM6BR	1	Planbricka M6
3	XSM6BRTG	2	Taggbricka M6
4	MED1640	1	Fäste vårdastyrning vänster sida
5	MC6SM6X60	1	Bult M6x60
6	MC6SM6X35	1	Bult M6x35
7	MC6SM6X16	1	Bult M6x16

OBS!

Om du vill använda originalhjulen, så måste ni byta till 12,7 mm lager i hjulen, samt en 12,7 mm QR-axel.

Bromsjustering


Efter montering av E-Drive-hjulen behöver bromsarna justeras. Demontera och ersätt skruven med en längre typ samt montera distans. I övrigt justera enligt Etacs manual.

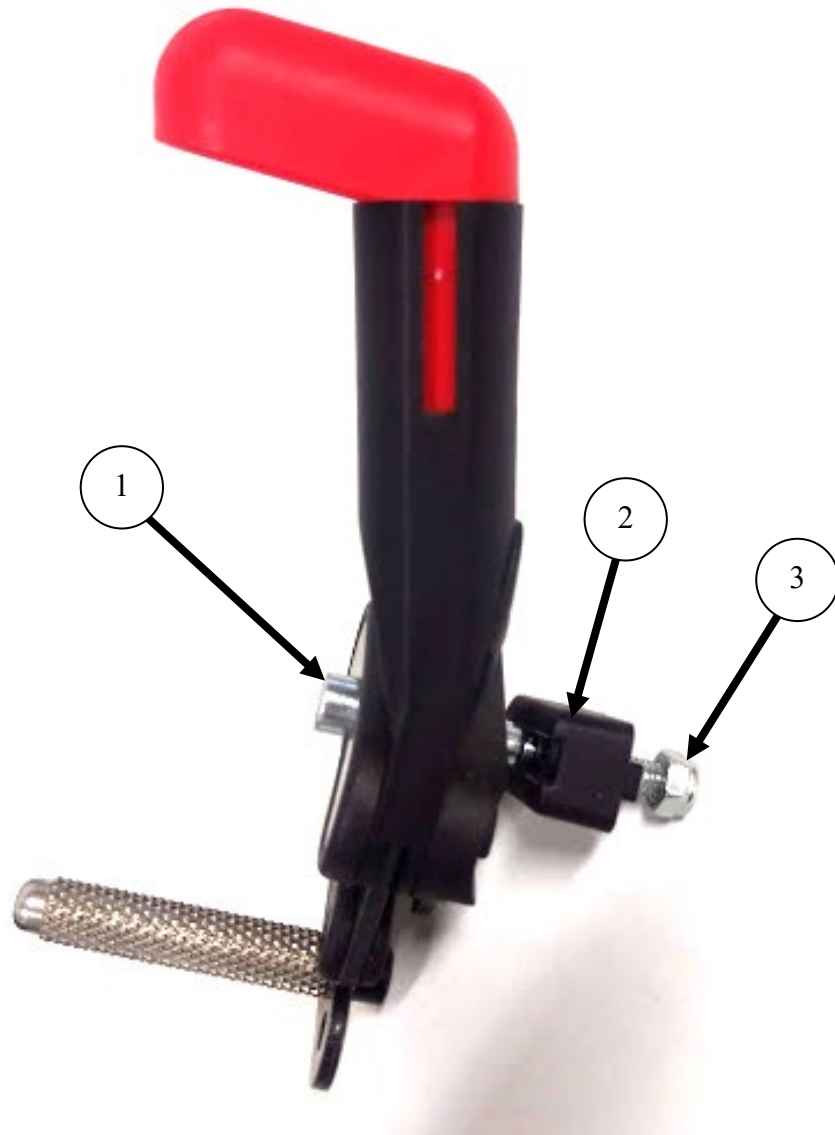

<i>Placering.</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Antal</i>	<i>Beskrivning</i>
1	MC6SM6X65	1	Skruv M6 x 65
2	50393	1	Distans
3	XSM6ML	1	Låsmutter M6



M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

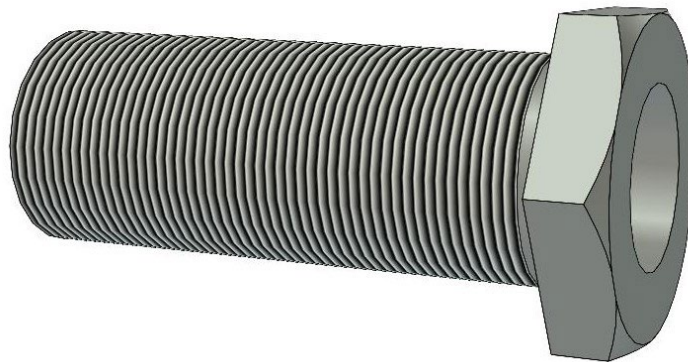

M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm