



Universalfäste för eWalk MCG1900




Innehåll.

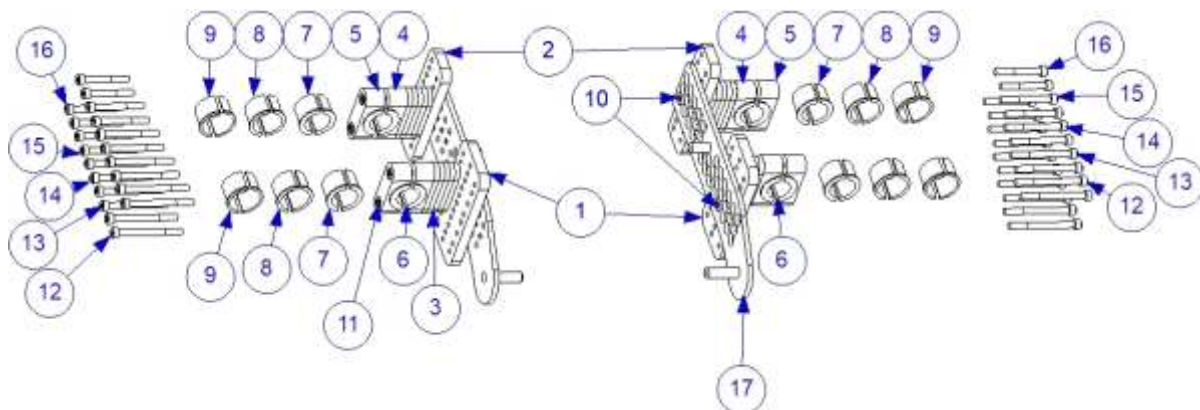

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	MCG1903	2	Bakre Plate
2	MCG1904	2	Främre Plate
3	MCG1905	20	Distans Plate
4	MCG1906	4	Överfallshus
5	MCG1907	4	Överfalls klamma
6	MCG1922	8	Distans 22
7	MCG1925	8	Distans 25
8	MCG1928	8	Distans 28
9	MCG1930	8	Distans 30
10	XSFM6X14	4	Försänkt Skruv M6 x 14
11	MC6SM6X70	8	Skruv cylindrisk M6 x 70
12	MC6SM6X65	8	Skruv cylindrisk M6 x 65
13	MC6SM6X60	8	Skruv cylindrisk M6 x 60
14	MC6SM6X55	8	Skruv cylindrisk M6 x 55
15	MC6SM6X50	8	Skruv cylindrisk M6 x 50
16	MC6SM6X45	8	Skruv cylindrisk M6 x 45
17	MCG1902R	1	Fäste med pinnar Höger
18	MCG1902L	1	Fäste med pinnar Vänster

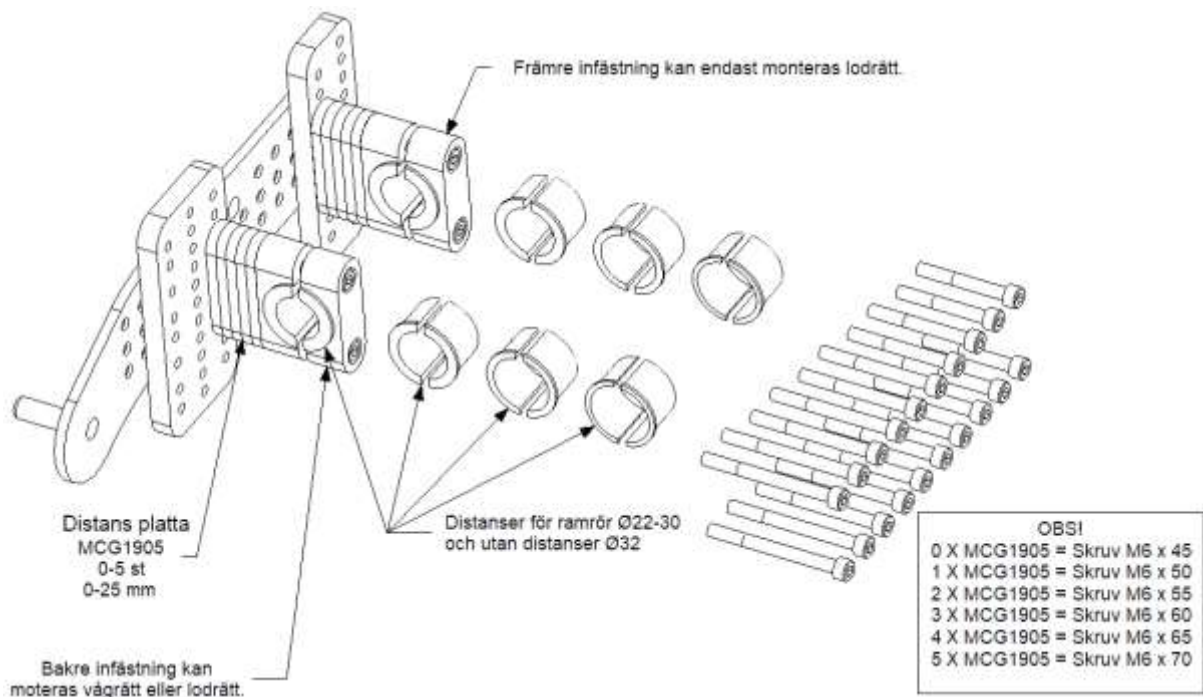

1. Välj distanser till ramrör om du behöver.
 2. Välj distans plattor för att komma ifrån ramrör eller tippskydd om du behöver.
 3. Montera enligt bilden nedanför.
- Om du har monterat bakre pinnen på 195 mm och den främre pinnen på 225 mm, är fästet är optimalt placerat för en vågrätt montering.

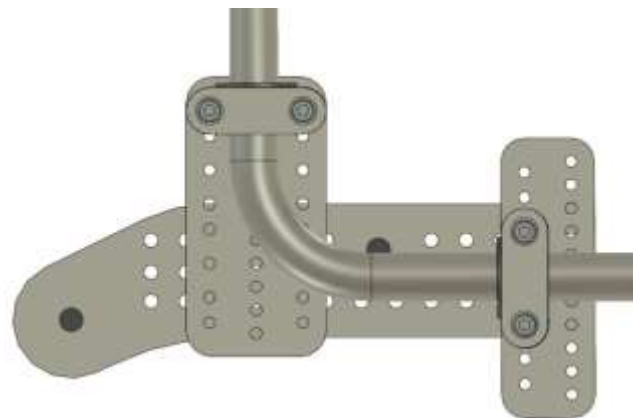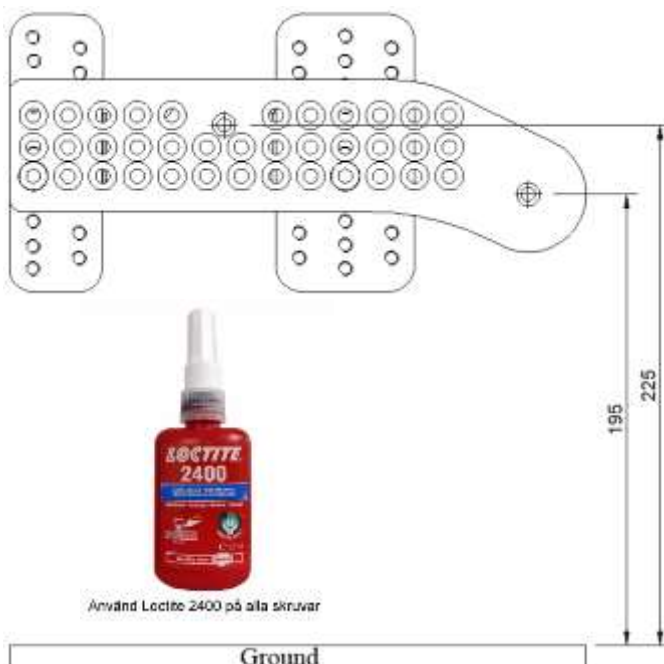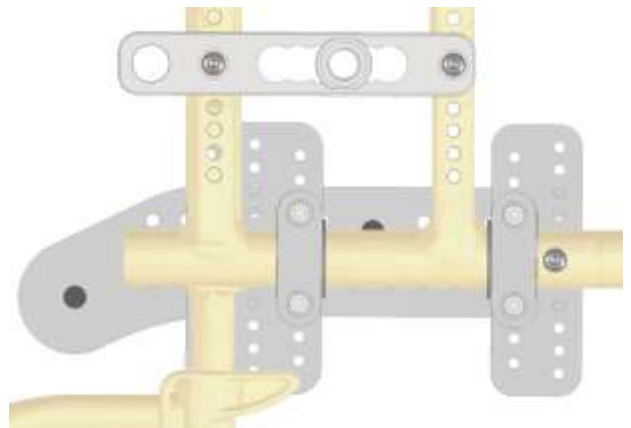

**Om inget annat specificeras, använd följande åtdragningsmoment.
Unless otherwise specified, use the following tightening torque.**

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsa.
Sleeve.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm