



Monteringsanvisning Etac Cross5

MEM6153P och MEM6154P

1. Demontera hjulen och nav med bromsar på båda sidorna.

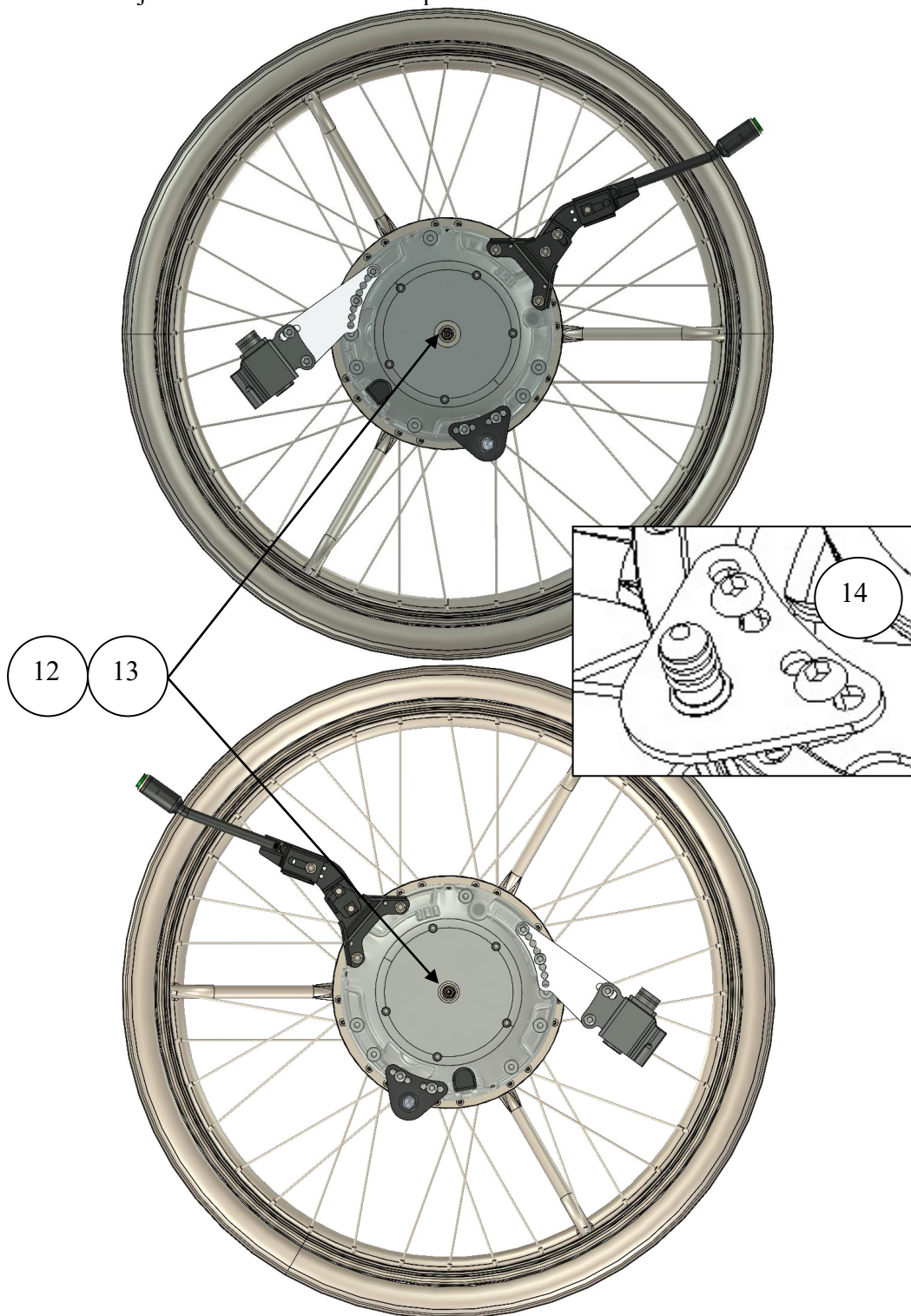

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.
 - Stopp pinne är monterat med Detalj nummer: 320003.

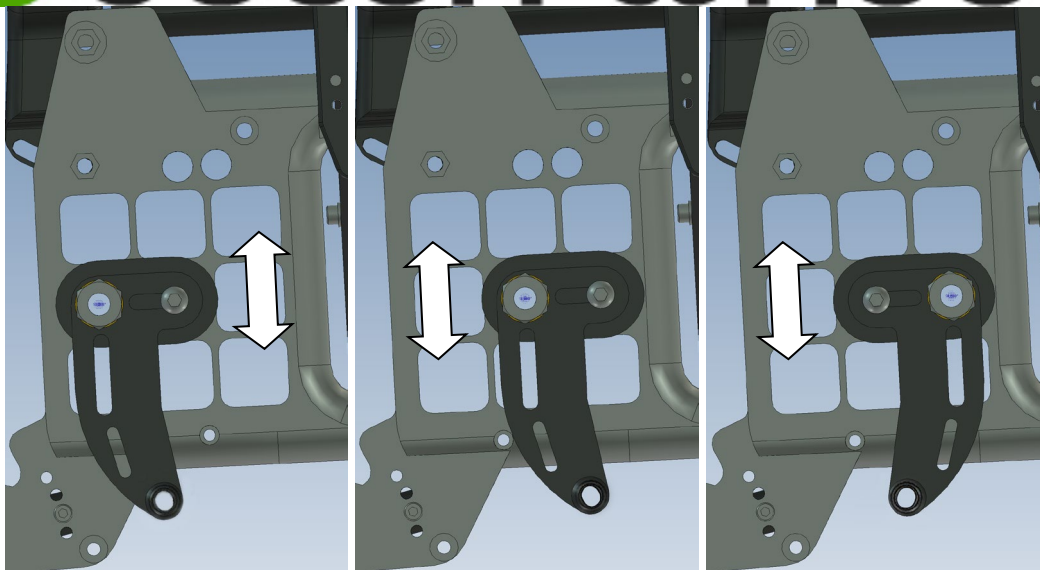


3. Montera nu fästet enligt bilden ovan.

Placerings alternativ:

Det går att montera i alla rader lodrät och vågrätt, dock enbart centrum placerat i respektive hål i ramen.

OBS! Tänk på att det går att montera fästet i den främre kolumnen, om ni använder vänster fästet på höger sida och höger fästet på vänster sida, se bilden till höger ovan.

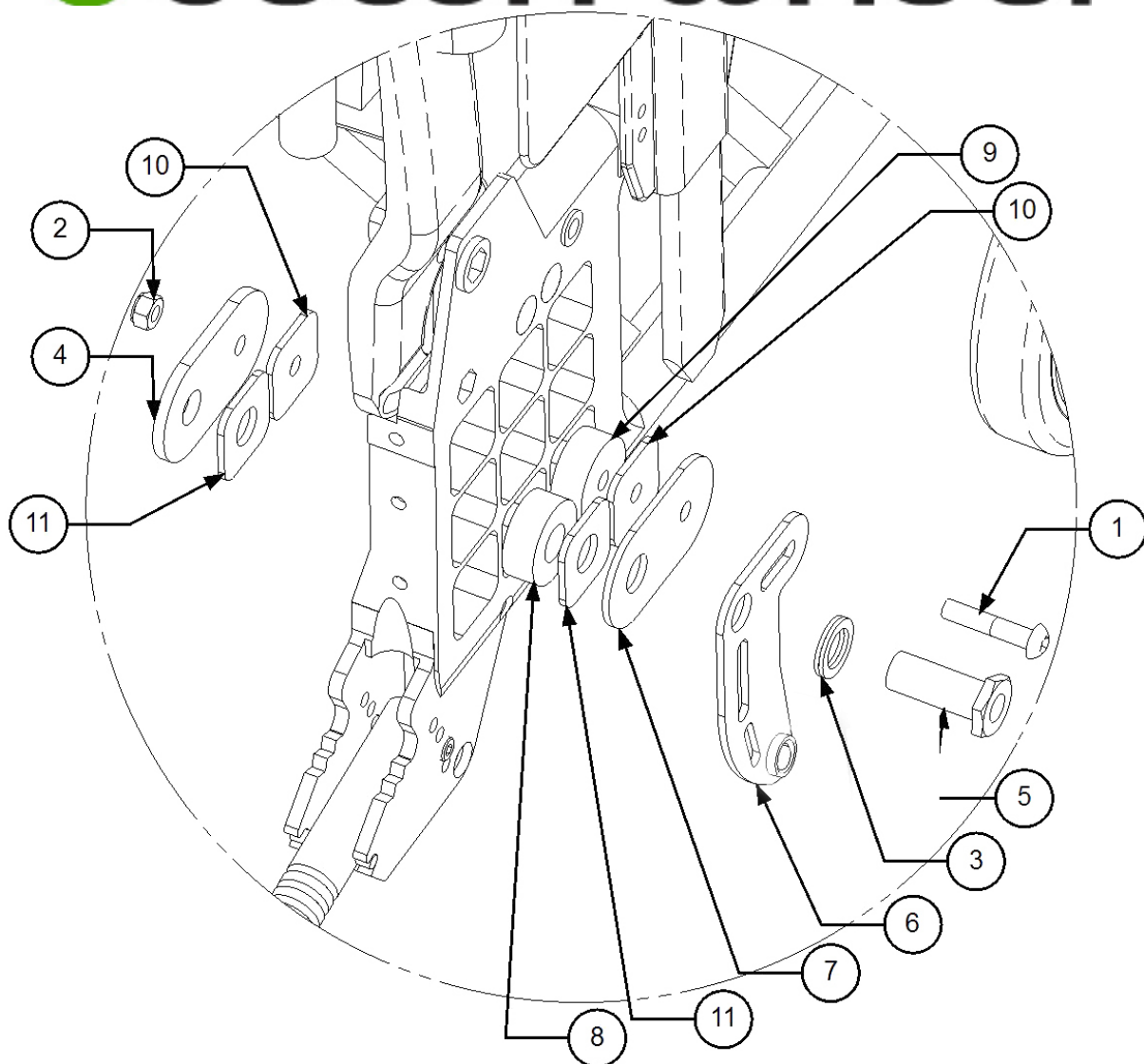

4. Se bild som visar montering av fästet och inflyttning av tippskyddet på höger sida.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM8X40	1	Skruv Rundad M8 x 40
2	XSM8ML	1	Låsmutter M8
3	405239	1	Nordlock Bricka
4	MED3100-02	1	Platta Cross5
5	HW063	1	Navhylsa
6	310022	1	Fäste
7	MED3100-01	1	Platta Cross5
8	100 400 084	1	Distans Cross5
9	100 400 083	1	Distans Cross5
10	MED3100-03	2	Distans Platta
11	MED3100-04	2	Distans Platta
12	XOE-25383-00	1	Distans 12
13	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringssats medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

5. Montera nu den rygghängda batteriväskan på ryggen eller som alternativ enligt bilderna nedan.



OBS!

Läs brukarmanualen innan ni använder produkten. Detta skall göras för att ni skall få all information om produktens handhavande, varningar samt säkerhetsföreskrifter.



**Om inget annat specificeras, använd följande åtdragningsmoment.
Unless otherwise specified, use the following tightening torque.**

Metrisk grovgångor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Sleeves.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm