


Monterings anvisning E-Move för KiMobility Liberty FT MEM6367, MEM6368

1. Tänk på att montera rullstolens original tippskydd.
2. Demontera hjulen och navhylsorna på båda sidorna.



3. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12,7 x 46 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00
 - Spakfäste med Detalj Nummer: XOE-46383-10


4. Bilderna visar montering av fästet på höger sida.
För montering på en sida ingår följande.

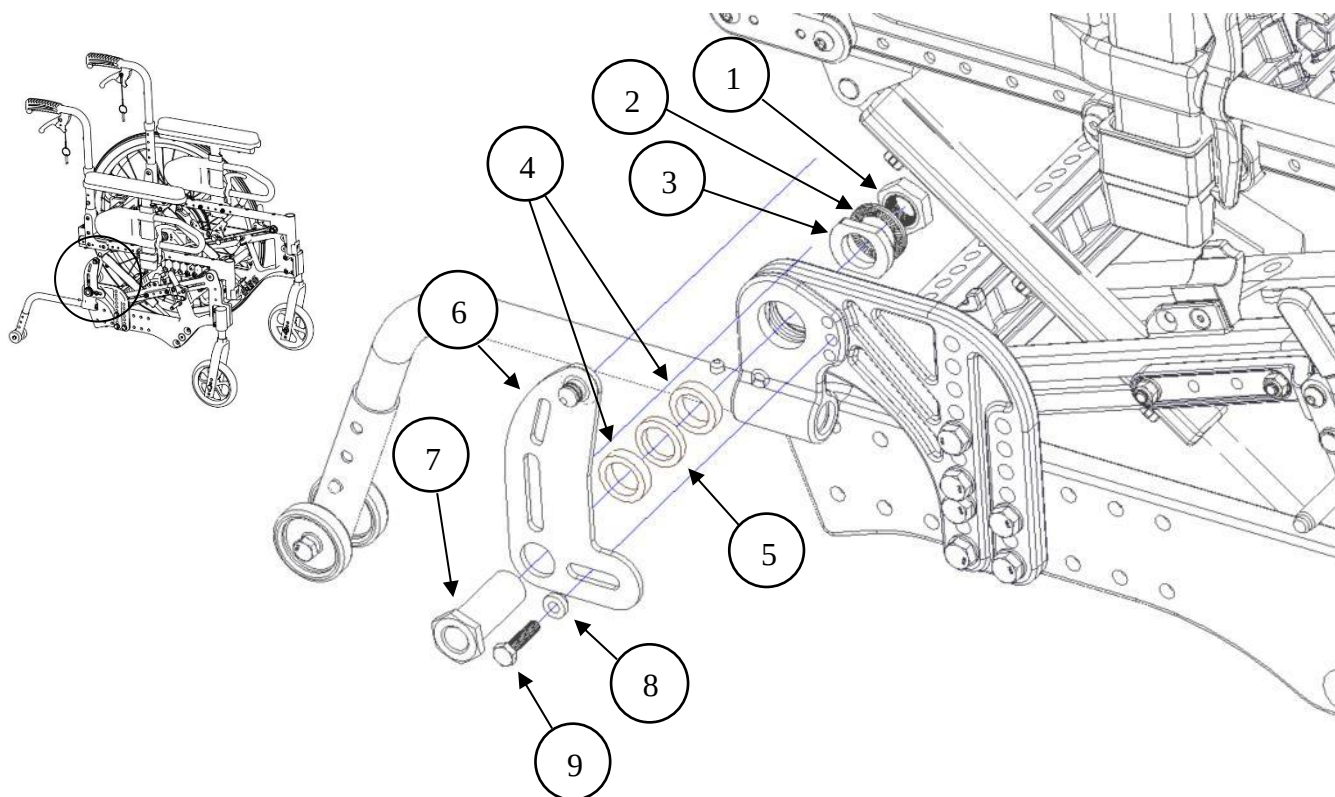

Placering.	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM18M	1	Mutter M18X1 Låg
2	405241	1	Nordlockbricka M18
3	100 400 100	1	Distansbricka 5mm
4	100 400 015	2	Distans 6mm
5	100 400 014	1	Distans 4mm
6	XOE-22294-10	1	Fäste
7	HW084	1	Navhylsa M18
8	100 400 020	1	Distans med styrning 3mm
9	M6SM6X25	1	Skruv M6x25 sexkant

OBS! Vid separat köp av monteringsats medföljer ej axel, axeldistans eller spårning, för byte se service bok.

4. Begränsningar. Notera att de kryssmarkerade hålen för hjulets höjd och balansjustering ej går att nyttja i kombination med E-Move. Tillgänglig fällvinkel minskar från 0-20° till 0-16,5°.

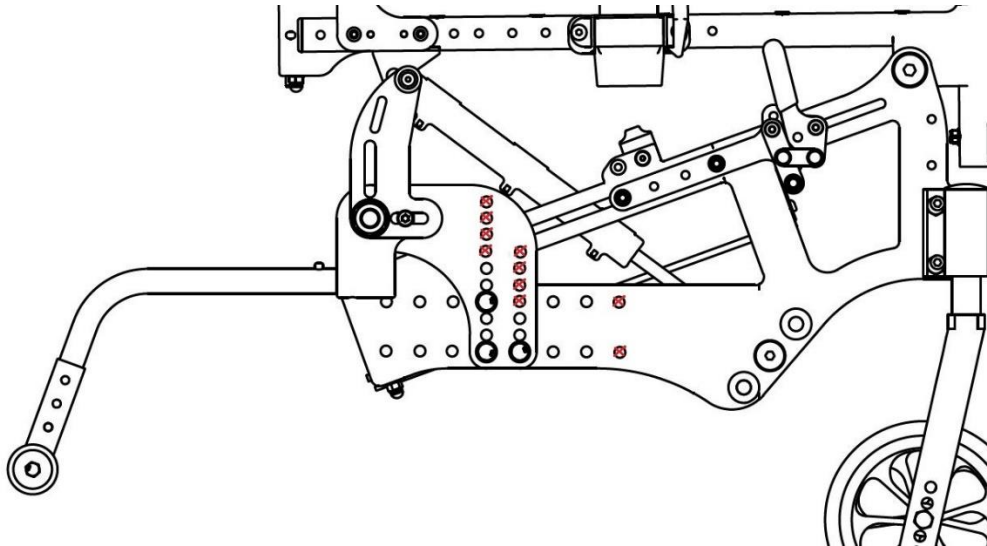

5. Montera nu den rygghängda batteriväskan.



Åtdragningsmoment / Tightening torque

Metrisk grovgångor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Navhylsor.
Hubsleevers.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M16x1	30 Nm
M18x1	40 Nm