



**E-DRIVE**



**decon**

Upplev friheten och  
förenkla din vardag





 **E-DRIVE**

## Frihet och Kontroll

### VAD FÅR JAG NÄR JAG BESTÄLLER E-DRIVE?

- 2 motordrivna hjul i storleken 16", 20", 22", 24", 25" eller 26"
- 2 styck anodiserade aluminium drivringar
- Tippskydd
- Enkelt att programmera genom joystick, alternativt genom Smart-tune programvara i dator/surfplatta
- Batteri + batteriladdare
- En batteriväska ingår när du väljer batteri under sätet eller bakom ryggen
- Svensk manual
- 2 års garanti



Välkommen att kontakta oss  
på telefon 0345 - 408 80  
eller [info@decon.se](mailto:info@decon.se)



Upplev friheten med E-Drive och förenkla din vardag. E-Drive monteras enkelt på manuell rullstolar och är utrustade med navmotorer med den senaste tekniken. Här kan man välja att använda motorn eller rulla själv. På E-Drive ges möjlighet för individuell anpassning som ger kvalitet för användaren.

Med hjälp av joysticken eller ett datorprogram kan man enkelt justera parametrar för fartökning, fartminskning, svängkänslighet, känslighet i joysticken eller de tre olika körstilarna, sport, standard eller soft. Styrningen görs enkelt med en joystick. Displayen syns även i direkt solljus. E-Drive kan även utrustas med vårdarmanövrering. E-Drive passar lika bra att använda inomhus som utomhus.

### TEKNISKA FAKTA

Motor	24V 120Wx2
Batterityp	Nickelmetallhydrid, 24Vx6,7 Ah (tillval Li-ion, 25Vx11,8Ah)
Hjul	7 kg
Totalvikt	16 kg (inkl NiMH batteri) , 17,5 kg (inkl Li-ion batteri)
Ökad stolbredd	Ca. 4 cm (total)
Hjuldimensioner	16", 20", 22", 24", 25", 26"
Lufttryck	6 Bar, 600 kPa
Hastighet	0-6 km/t
Max körsträcka vid Fulladdade batterier	Ca 15 km med NiMH, Ca 35 km med Li-ion, enligt ISO 7176-4
Säkring	30 A (flat)
Max brukarvikt	Upp till 125 kg
Max brukarvikt "heavy duty"	Upp till 150 kg
Max baktagningsförmåga	6"
CE Märkning	Enligt kraven EU-Direktive 93/42/EEG
Användarinstruktioner	Se brukarmanual

Joystick	Kontaktlös avkänning av single-chip
Spak motstånd förändring	Spakfjädrar med olika motståndsnivåer
Telefonladdare	Genom integrerat USB port (5V, 500 mA max.)
Skärm	LCD (Synbar i solen)
Programmera parametrar	Joystick eller dator (Smart Tune)

Batteriladdare	100 to 240V AC, 50/60Hz
Beräknad effekt	37V. 26A (under laddning)
Laddtid	Normal uppladdning ca. 2-3 timmar

### ARTIKELNUMMER E-DRIVE

NiMH		Li-ion	
16"	MED316	16"	MEDL316
20"	MED320	20"	MEDL320
22"	MED322	22"	MEDL322
24"	MED324	24"	MEDL324
25"	MED325	25"	MEDL325
26"	MED326	26"	MEDL326

## DRIVRINGAR



Profiler	Material	16"	20"	22"
* Aluminium	Aluminium	X		
	Rostfritt	X	MED5100	MED5110
	Poly kompakt	X	MED5200	MED5210
	Poly gele	X	MED5300	MED5310
	Max grepp	X	MED5400	MED5410
Material				
	Material	24"	25"	26"
* Aluminium	Aluminium			
	Rostfritt	MED2313	MED5125	MED5130
	Poly kompakt	MED2303	MED5225	MED5230
	Poly gele	MED2323	MED5325	MED5330
	Max grepp	MED2333	MED5425	MED5430

## DÄCK



Material	16"	20"	22"
Finnmönstrat	X	DF2011-B	DF2212-B
Pu finnmönstrat	X	DP2002-B	DP2202-B
Finnmönstrat/flexelslang	X	DF2011-B/MS2011	DF2212-B/MS2210
Grovmönstrat 1"	X	X	DM2212
Grovmönstrat 1 3/8"	DF1601	DM2013	X
Material			
	24"	25"	26"
Finnmönstrat	DF2411-B	DF2511-B	DF2611-B
Pu finnmönstrat	DP2401-B	X	DP2602-B
Finnmönstrat/flexelslang	DF2411-B/MS2410	DF2511-B/MS2510	DF2611-B/MS2610
Grovmönstrat 1"	DM2413	X	X
Grovmönstrat 1 3/8"	DM2412	X	X

## TILLBEHÖR

### Mountain

E-Drive Plus 24", Blackline, Mountain, NiMH MED324-M

### Batterier

NiMH batteri, 24V x 6,7Ah MEM2001  
 Li-ion batteri, 25V x 11,8Ah XOC-82100-B00

### Batteriladdare

NiMH Batteriladdare (Utan sladd för Lion), E-Move/E-Drive XOF-8210C-H00  
 NiMH/Lion Batteriladdare, E-Move/E-Drive XOF-8210C-G00

### Joystick

Monterad på vänstersidan Ange stolsmodell vid order  
 Monterad till vårdare Ange stolsmodell vid order  
 Parallellarm XOF-48160-D00



**Parallellarm**  
 Kör närmare mot bordet och ha fortfarande joysticken i rätt riktning.

### Vårdarstyrning

Vårdarstyrning för höger sida (exkl. monteringsset) MED1200



# E-DRIVE

## TILLBEHÖR

### Ekerskydd

Skydda fingrarna från att bli skadade av ekrarna.

16"	X
20"	SG2008
22"	SG2208
24"	SG2408
25"	SG2508
26"	SG2608

### Spänningsomvandlare

Ladda ditt batteri i bilen, båten, husvagnen eller husbilen. Output 230VAC 50Hz 150W. MED12V



## SIMPLEX - Intuitiv vårdarstyrning

Intuitiv vårdarstyrning XOF-482520  
Adapter till intuitiv vårdarstyrning IN0020  
(ange rullstolsmodell)



## TIPPSKYDD med uppresningsfunktion

Tippskydd TB20005  
Adapter till Tippskydd  
(ange rullstolsmodell)



## BATTERIPOSITIONER

Fällbara rullstolar har alltid möjlighet att ha batteriet i en väska bakom ryggen. Aktiva rullstolar har ofta möjlighet att ha batteriet under sätet.

Se vår adapterlista och vilken batteriposition som är standard för din rullstol.



Bakom ryggen



Under sitsen



På hjulet

## JOYSTICK

Svängbarheten av joystick förenklar i och urstigning.

Maximala vinkeln varierar på olika rullstolar.



**Tillval:**  
Parallellarm förflyttning

Kör närmare mot bordet och ha joystick fortfarande i rätt riktning.



## ADAPTERSET

### Adapterset

Adapterset finns på hemsidan [www.decon.se](http://www.decon.se) uppdateras löpande.

## 1 BATTERIER



- 1 = NIMH BATTERI, KÖRSTRÄCKA 15KM  
2 = LI-ION BATTERI, KÖRSTRÄCKA 35KM

Båda batteriladdarna kan utföra:

- Normal uppladdning (2-3 tim, full kapacitet)
- Service uppladdning (enbart NiMH) (3-13 tim, full kapacitet)

Laddaren har ett inbyggt serviceprogram (3-13 tim). Servicelampan blinkar (gul) när batteriet behöver en serviceuppladdning (en gång var 13-26:e uppladdning).

Båda batterierna kan kommunicera data med ett enkelt knapptryck.

Informationen som du kan få från batteriet:

- Batterikapacitet indikation (relativ indikation)
- Enkel batteridiagnos
- Försämring nivåindikering (förhållandet i % jämfört med nytt batteri)
- Använd frekvensvisning (indikation antal cykler)

För ytterligare information vänligen se vår servicemanual. För artikelnummer vänligen se batterier och batterieladdare under Tillbehör i slutet av E-Drive kapitlet.



## HAR DU FRÅGOR ELLER VILL BESTÄLLA?

0345-408 80 – Vi hjälper dig gärna!

## Checklista för att beställa

- För standardutrustning se "Vad får jag när jag beställer en E-Drive".
- Om du beställer E-Drive som har andra drivringar eller däck som inte är standardutförande, ange bara artikelnummer så ändrar vi automatiskt till rätt pris.
- Beställ den nödvändiga adaptern Till en (1) E-Drive behöver du beställa två adaptrar (1xV/1xH). Om den nödvändiga adapterna inte finns vår hemsida kontakta oss, så hjälper vi dig
- Kontakta oss om du inte hittar informationen du söker
- Undersök om det finns något tillbehör som önskas
- Om du vill ändra standardläget för batteriet, kan du beställa din önskade batteriposition på ordern.
- Kontrollera din orderbekräftelse, om något är fel eller oklart kontakta oss omedelbart.
- När du får dina produkter, vänligen kontrollera förpackningen för skador. Om något är skadat, kontakta oss innan du skriver under för att ta emot produkter



 **decon**  
[www.decon.se](http://www.decon.se)

Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk

Telephone: +46 (0)345 40880 - Fax: +46 (0)345 40895

E-mail: [info@decon.se](mailto:info@decon.se)

Decon reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tillfället för denna tryckning.  
Alla rättigheter är reserverade för Decon. Med förbehåll för tryck- och skrivfel samt utgångna varor och felaktiga bilder.