

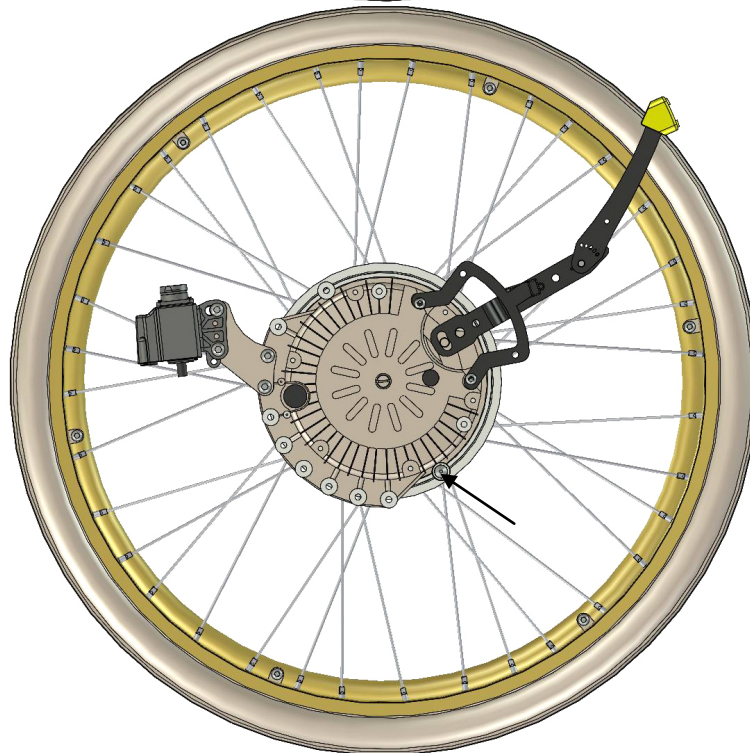


**Monterings anvisning för Kuschall Serie K
MED3193**

1. Demontera hjulen på båda sidorna.

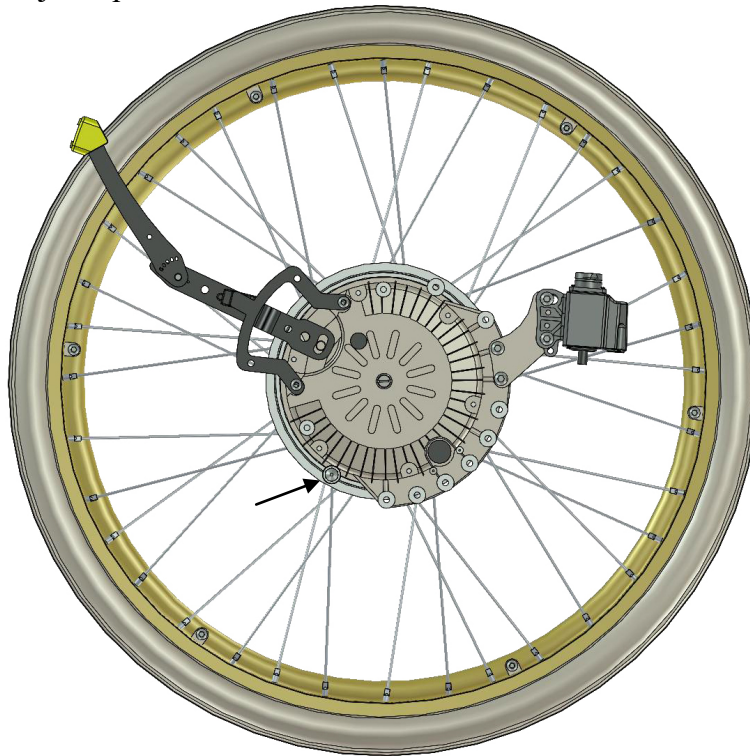

2. Kontrollera att stopp pinnen sitter enligt bilden ovan. E-Drive tippskydd och centrum distansen skall vara demonterade, stolens original tippskydd användes.

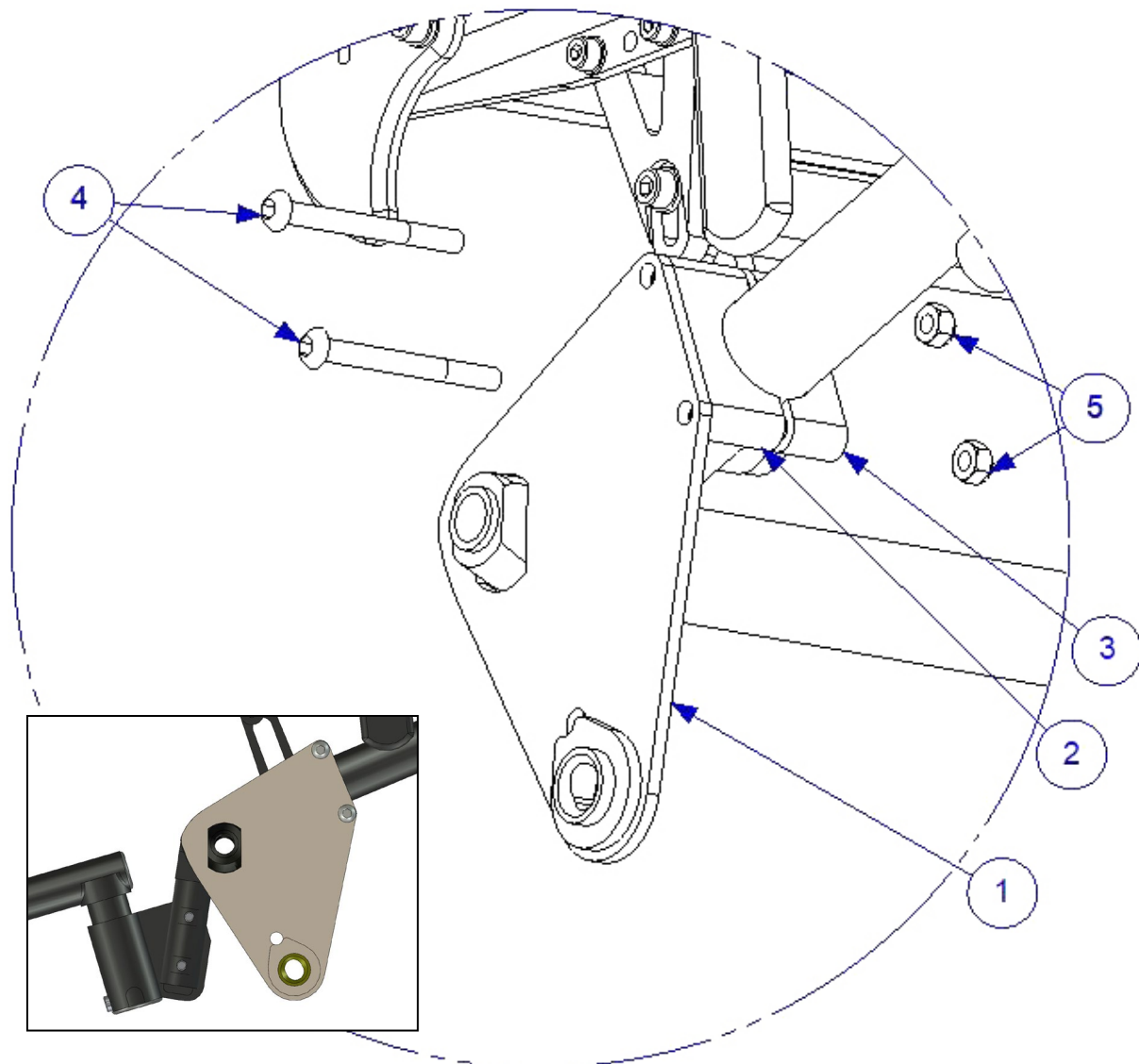


Montera nu fästet se bilderna ovan som visar montering av fästet på höger sida.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering.	Detaljnummer	Antal	Beskrivning
1	MED1441R	1	Höger Fäste
2	300088	1	Klamma
3	300089	1	Klamma
4	XSM6X60	2	Skruv Rundad M6 x 60
5	XSM6ML	2	Låsmutter M6

3. Montera nu den rygghängda batteriväskan.

Joysticks montering

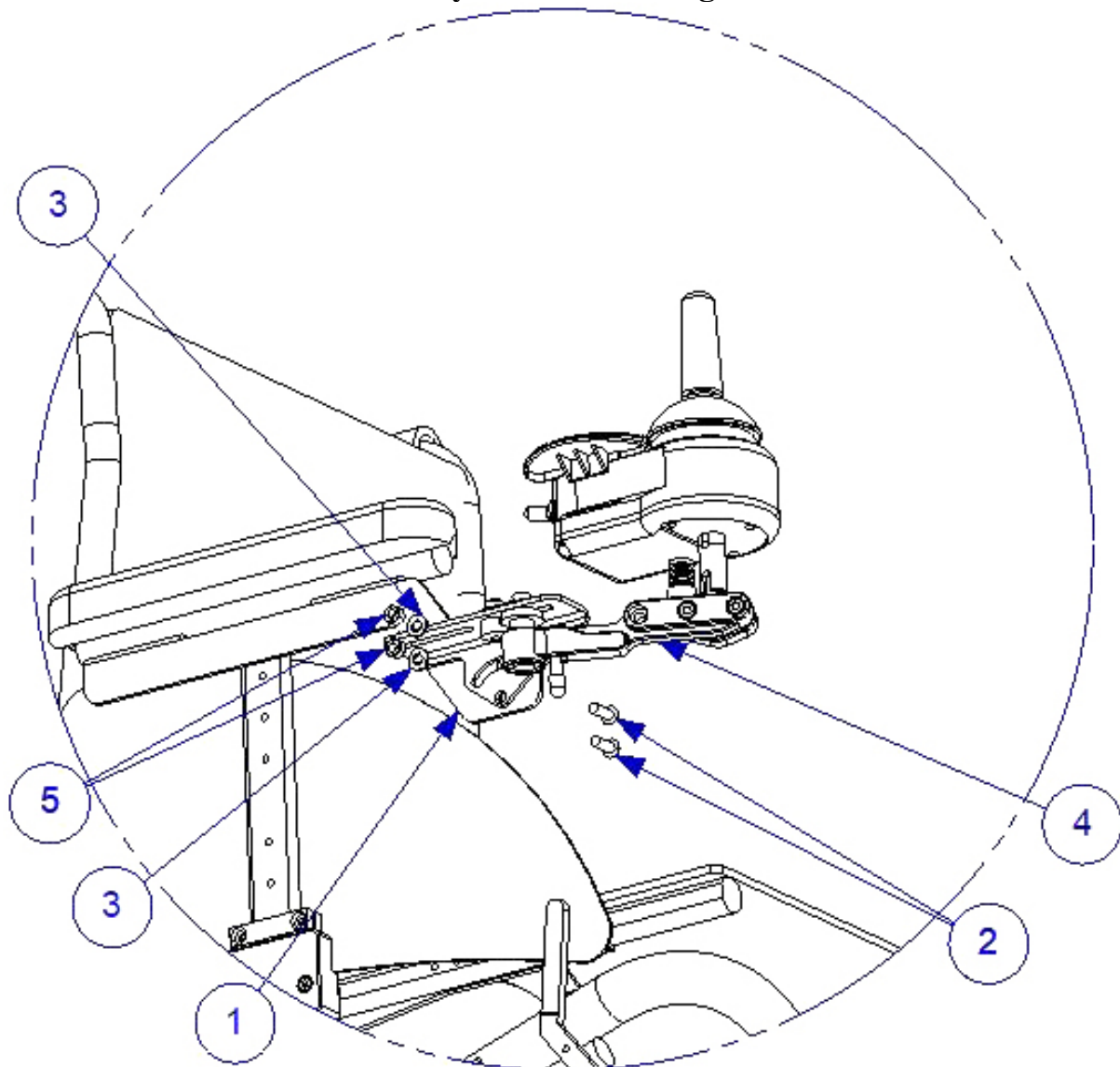

Placering.	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	MED1500 Rev5	1	Fäste
2	XSM6X16	2	Skruv Rundad M6 X 16
3	XSM6BR	2	Planbricka M6
4	XOC-48160-B0	1	Övre hållare 2
5	XSM6ML	2	Låsmutter M6