



Monterings anvisning Etac Cross, Cross XL, Twin MEM6001 och MEM6002

1. Demontera hjulens nav med bromsar på båda sidorna.

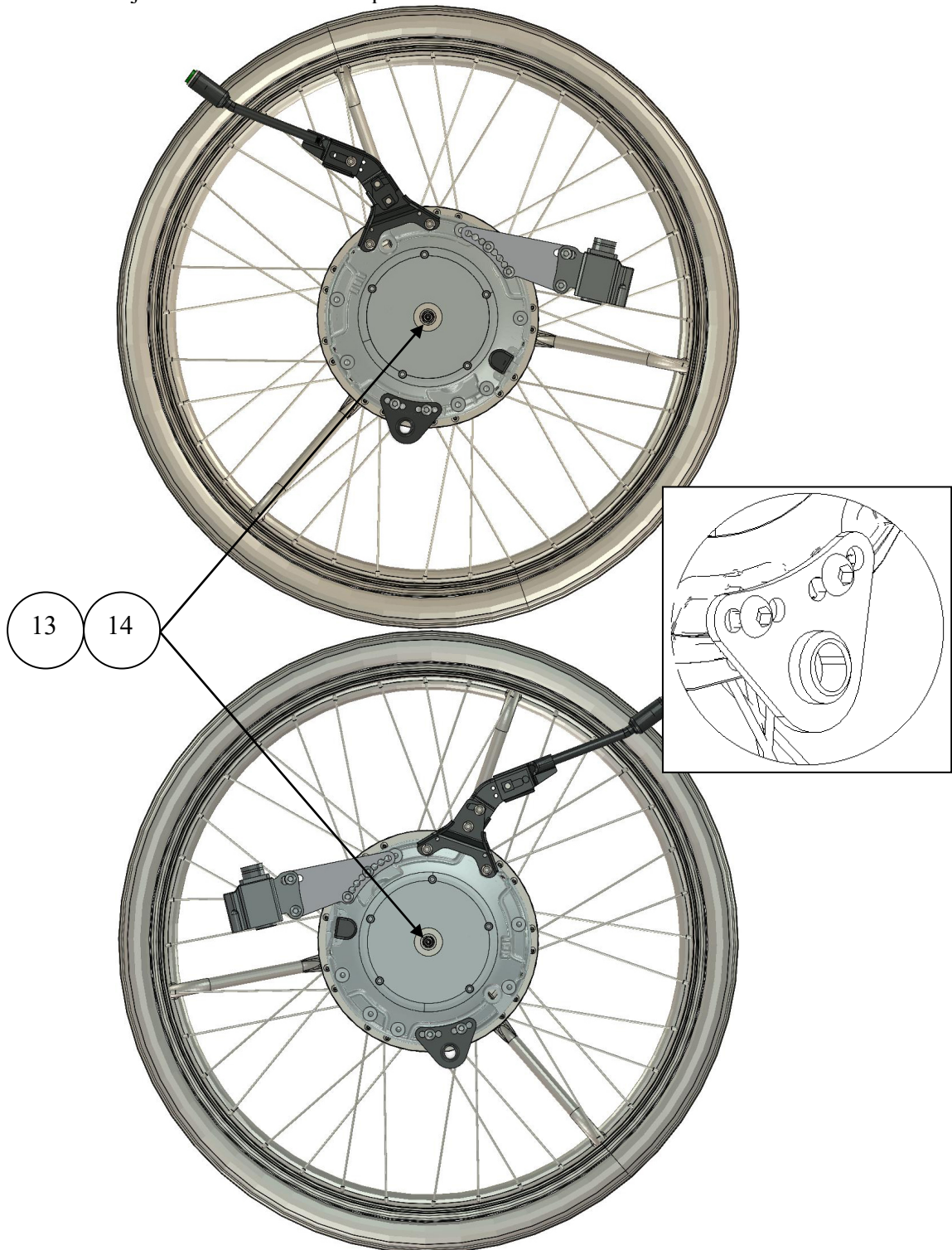

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.

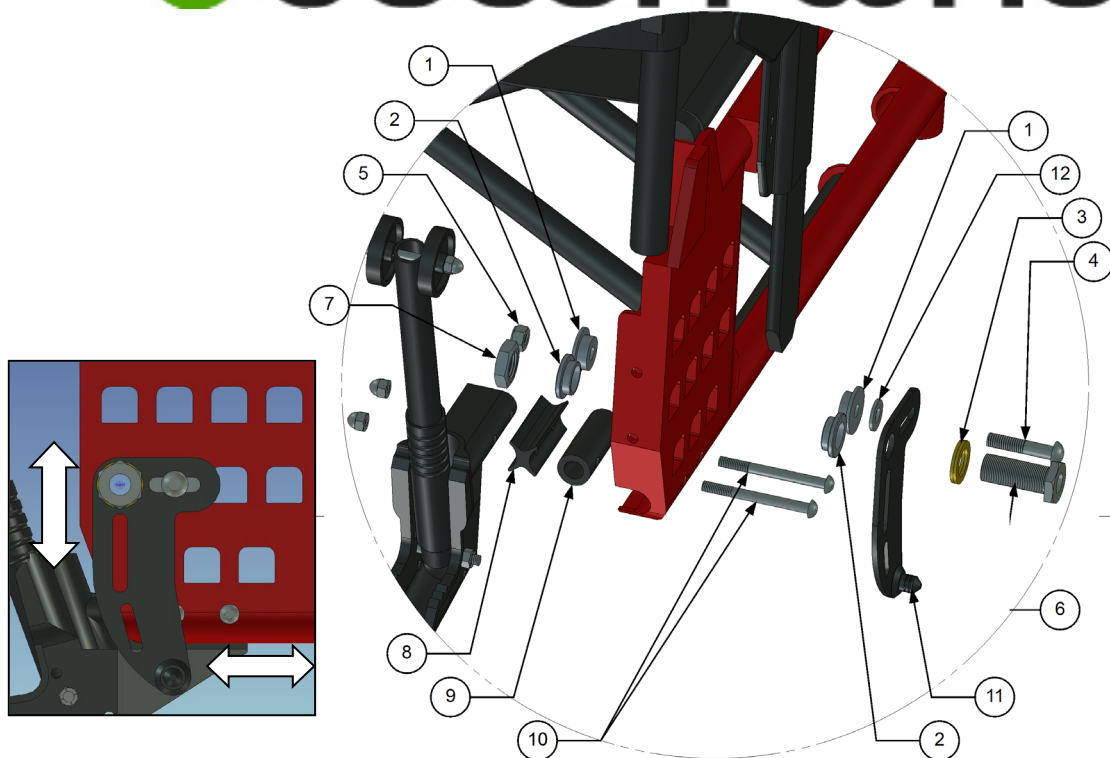


3. Montera nu fästet enligt bilden ovan. Placeringsalternativ finns.

Se bild som visar montering av fästet och inflyttning av tippskyddet på höger sida.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	280008	2	Distans
2	BR1100-03	2	Distans
3	405239	1	Nordlock Bricka
4	XSM8X40	1	Skruv M8 x 40
5	XSM8ML	1	Låsmutter M8
6	HW063	1	Navhylsa
7	XSM16M	1	Mutter M16
8	80745	1	Distans profil
9	80745-1	1	Rör
10	XSM6X45/XSM6X65	2	Skruv M6 x 45/65
11	XOE-22294-B0	1	Höger fäste
12	XSM8BR	1	Planbricka M8
13	XOE-25383-00	1	Distans 12
14	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringsats medföljer ej axel, axeldistans eller spårring, för byte se servicebok.

4. Montera nu den rygghängda batteriväskan.

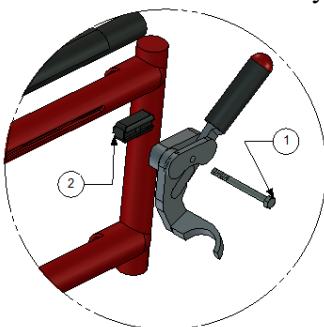

Placering	Artikelnummer	Antal	Beskrivning
1	X6SM6X65	1	Bult M6 x 65
2	50393	1	Distans