



Monteringsanvisning

INFM7X05, INFM7X06, INFM7X09,
INFM7X10, INFM7X11, INFM7X16,
INFM7X20, INFM7X20L, INFM7X22,
INFM7X22L, INFM7X23, INFM7X25,
INFM7X25L, INFM7X28, INFM7X30,
INFM7X30L, INFM7X32, INFM7X35,
INFM7X40

Infinity Adaptersats
Universal

1. Säkerhet och föreskrifter

Symboler



WARNING!

Risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till skador på operatören eller andra personer.



FÖRSIKTIGHET!

Risk för materiella skador.

En operation som, om den inte utförs korrekt, kan leda till materiella skador.



INFO

Extra viktig eller förklarande information.

Allmänna föreskrifter

Denna monteringsanvisning skall alltid följas vid montering av adaptersats INFM7 Universal. För att sedan kunna koppla Infinity på rullstolen krävs att Infinity ställs in enligt separat monteringsanvisning.


Varningar



WARNING!

Monteringsarbeten och ändringsarbeten som beskrivs i detta dokument får endast utföras av utbildad servicetekniker, återförsäljare eller annan av Decon Wheel utsedd representant.

2. Översikt

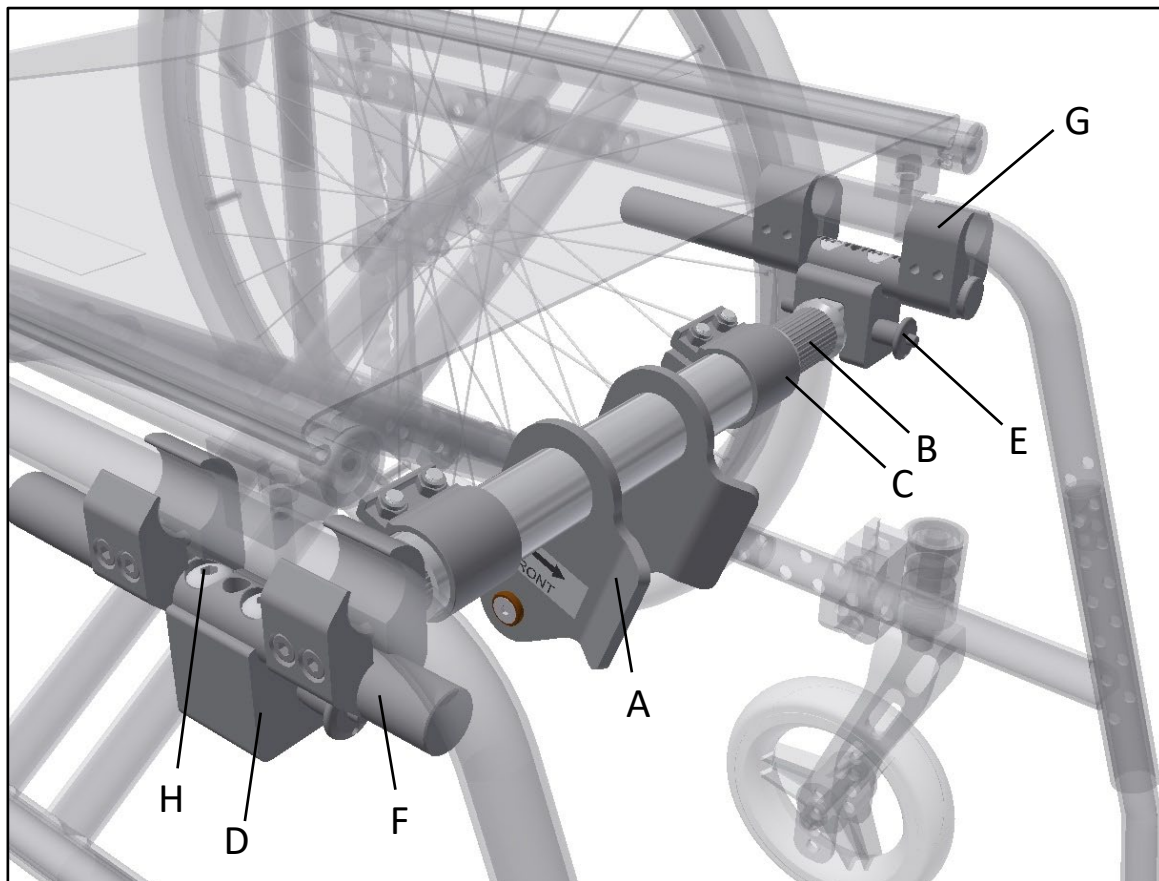

A Centrumrör adapterbalk

B Ytterrör adapterbalk

C Klämma

D Fäste adapterbalk

E QR-Pinne

F Stång

G Ramklämma

H Skruv fäste adapterbalk



Utformningen av ramklämmorna (G) kan variera mellan olika rullstolsmodeller och kanske inte stämmer överens med bilden ovan.

3. Montering och inställning

Montera först fäste adapterbalk (D) i stången (F) med hjälp av medföljande skruvar (H). Montera sedan dessa med hjälp av ramklammorna (G) på rullstolen, se bild för exempel. Måttet **X** från dynans framkant till främre delen av fäste adapterbalk (D) bör, om möjligt, vara **20-30mm** för att instryningen på centrumrör adapterbalk (A) skall synas utanför dynan.

Måttet **Y** bör inte vara större än **20mm** för att undvika att stången (F) inte får tillräckligt med stöd. Om möjligt så skall ramklammorna (G) sitta dikt an mot fäste adapterbalk (D).

Dra i detta läge åt klämmorna för rullstolsramen (G) löst så att stången (F) fortfarande kan flyttas något i klämmorna för rullstolsramen (G).

Montera båda sidor



INFO

Ramklämmorna (G) kan i vissa fall behöva vinklas inåt eller utåt för att göra plats åt rullstolens bromsar.




INFO

För att underlätta montaget kan rullstolens bromsar behöva monteras bort. På vissa stolar kan man även behöva lossa på sittklädseln för att göra plats för klämmorna som greppar om rullstolens ramrör.




WARNING!

Skruvorna (H) skall dras åt med ett moment om 10-15Nm. Loctite 243 eller likvärdigt skall appliceras på skruven innan den monteras.

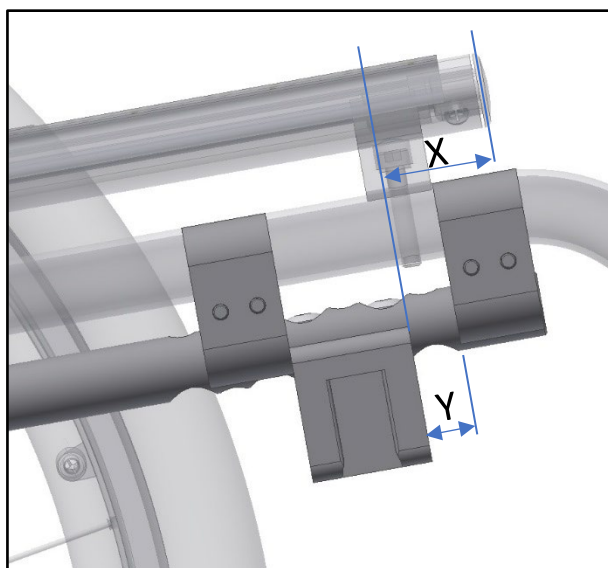

**WARNING!**


Det måste monteras en klamma på varje sida om hållaren för adapterbalken. Om inte detta görs finns risk att stången bryts av utmattning.

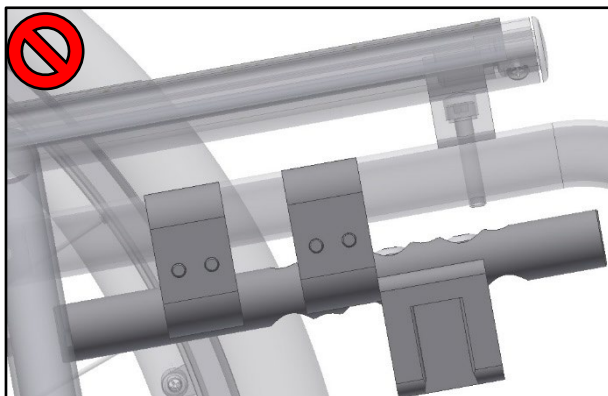

Montera den kompletta adapterbalken bestående av centrumrör (A), yterrör (B) och klamma (C). Denna fästs in i hållarna (D) med hjälp av QR-Pinnarna (E).

Se till att ändarna på dem yttre rören (B) är parallella så att adapterbalken passar in i sina hållare. Centrumröret (A) skall kunna flyttas i sidled samt roteras.

Dra nu åt skruvarna i samtliga klammor (G).

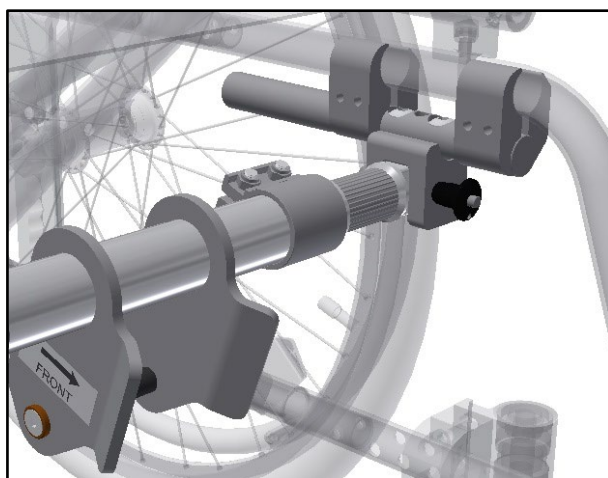**INFO**

Kontrollera så att pilen på klistermärket monterat på centrumröret (A) pekar framåt i körriktningen. Om detta är vänt fel kommer det ej gå att koppla Infinity mot adapterbalken.

**WARNING!**

Skruvarna i klammorna (G) skall dras åt med ett moment om:

7-9Nm (M6)

10-15Nm (M8)



INFO

Adapterbalken har splines med fasta lägen inuti sig. Därför kommer vattenpasset troligen ej att hamna exakt i våg utan man får välja det hack som är närmst. Nivåverktyget har markeringar "H" och "L". Om bubblan i vattenpasset hamnar åt det håll som är markerat "H" kommer länkhjulen lyfta högre från marken än om bubblan hamnar åt det håll som är markerat "L".

Inställning av rätt vinkel för centrumröret kan ske på två sätt beroende på hur långt dem yttre rören är instuckna i centrumröret. Båda sätten beskrivs nedan. **Nivåvekryget följer ej med leveransen av adaptersetet utan detta levereras tillsammans med Infinity.**

Alt1.

Med hjälp av det nivåverktyg som följer med leveransen av Infinity (inte adapter set) ställ in rätt vinkel på centrumröret genom att vrida detta tills det hamnar i våg. Röret har splines innuti sig, det kommer kännas ett litet klick för varje steg som röret roteras. När rätt vinkel har uppnåtts, kontrollera att centrumröret är centrerat i rullstolen. Dra nu åt skruvarna i samtliga klammor (C).

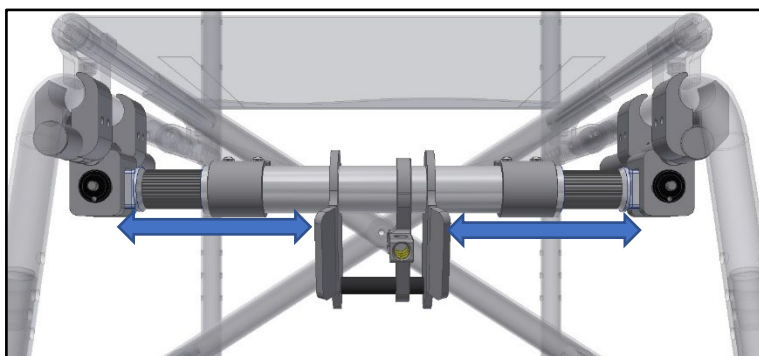
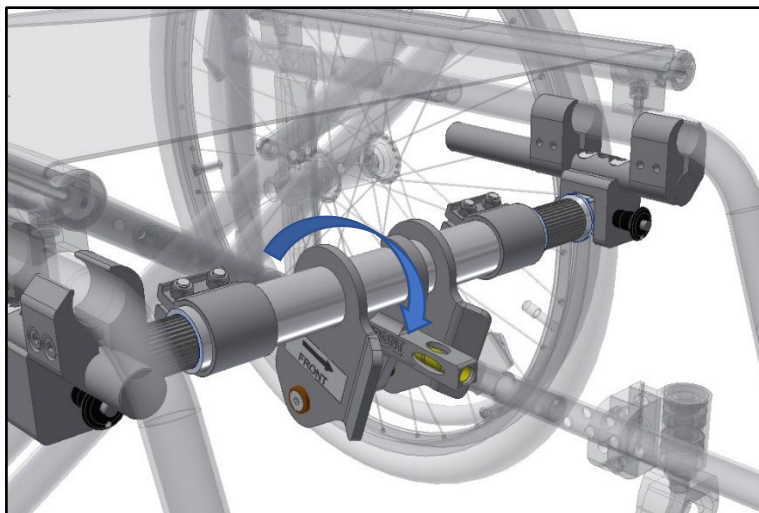


WARNING!

Skruvorna i klammorna (C) skall dras åt med ett moment om 7-9Nm.

Alt.2

Med hjälp av det nivåverktyg som följer med leveransen av Infinity (inte adapter set) ställ in rätt vinkel på centrumröret. Montera endast ett innerrör i centrumröret och vrida detta tills det hamnar i våg. När rätt vinkel har uppnåtts, montera den andra innerröret i samma position/vinkel som det första. Kontrollera att centrumröret är centrerat i rullstolen. Dra nu åt skruvarna i samtliga klammor (C).

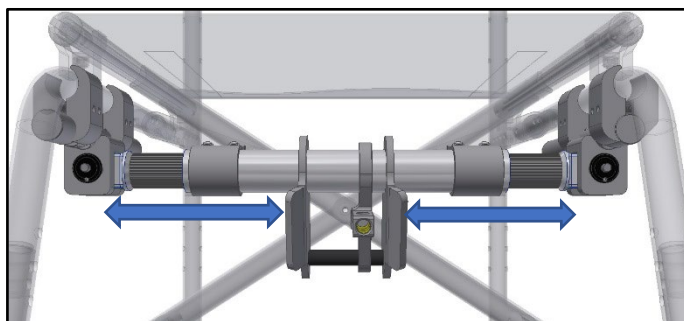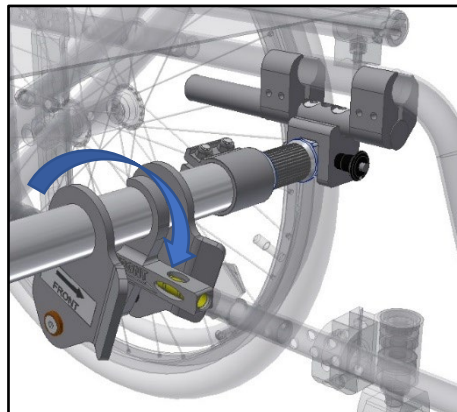**VARNING!**

Skruvarna i klammorna (C) skall dras åt med ett moment om 7-9Nm.

Läs nu igenom monteringsanvisningen för Infinity som följde med leveransen av denna. Montera och ställ in Infinity enligt de anvisningar som anges i denna.

**INFO**

I det fall rullstolens bromsar monterats bort vid montage av adapterbalken glöm ej att återmontera dessa. Om sittklädseln har lossats glöm ej heller att återmontera denna.

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 119, SE-314 93 Hyltebruk, Sweden
Tel: +46 (0)345 40880
Fax: +46 (0)345 40895
E-mail: info@decon.se

