


Monteringsanvisning E-Walk på Etac Cross 5 med SB35



MCG1171_SB35

1. Demontera hjulen på båda sidorna.
2. Demontera nav med bromsar på båda sidorna.

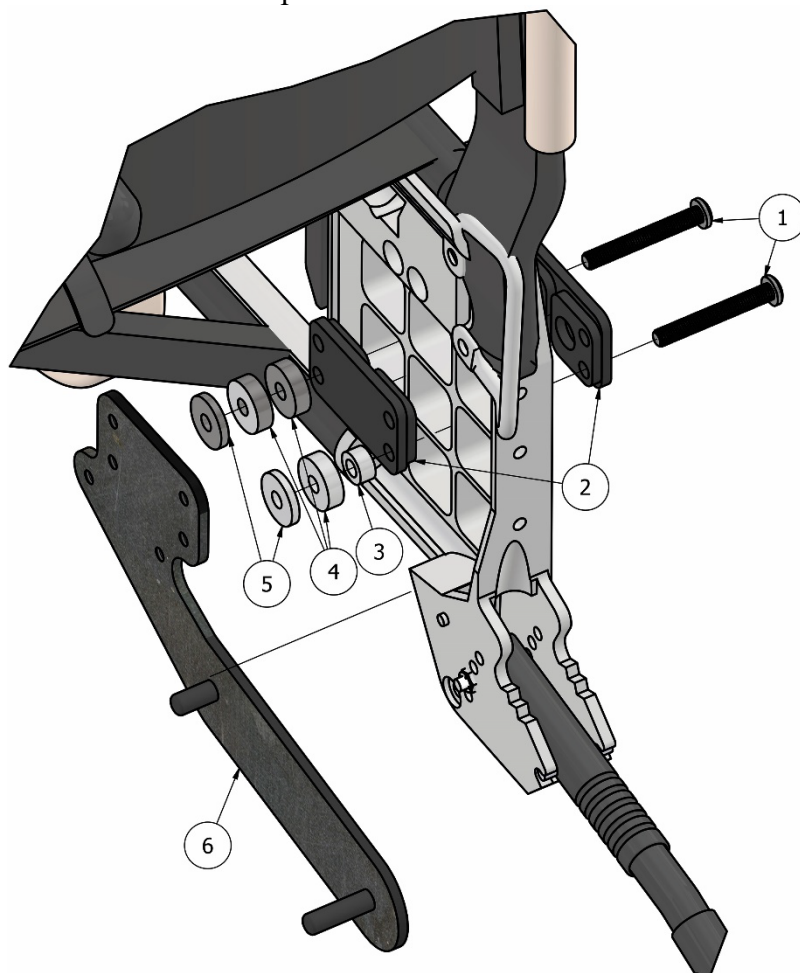


3. Montera nu fästet (Se bilder ovan) som visar montering av fästet på höger sida.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	XSM8X60	2	Skruv M8x60
2	MCG1171-07	2	Platta
3	100 400 003	1	Distans 8mm
4	100 400 013	3	Distans 8mm
5	100 400 011	2	Distans 4mm
6	MCG1171_SB35R	1	Platta Höger Cross5 SB35

4. Montera nu fästet på andra sidan.
5. Montera tillbaka bromsnav och hjul.

Det finns möjligheten att använda hjul i storlekarna 22", 24" och 26". Fästet måste placeras rätt för att matcha stolens höjd i förhållande till marken. Nedan bild visar skruvarnas placering för olika hjulstorlekar.

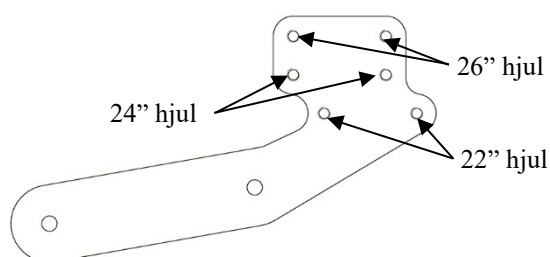


Optimal vinkel för eWalk Cross5




OBS! Tänk på att montera skruvarna i linje med navets centrum. Nedan exempel visar montering med 22", 24" och 26" hjul. Notera att de båda M8 skruvarna som förbinder infästningsplåten till E-walken med stolen alltid skall monteras i horisontal linje med hjulaxeln. Bilderna visar hjulen i mellan läget, både den undre och övre raden kan användas. Se pil till höger om bilderna.

Plåtens placering vid montering med 22" hjul.


Åtdragningsmoment
för navhylsan. 20Nm

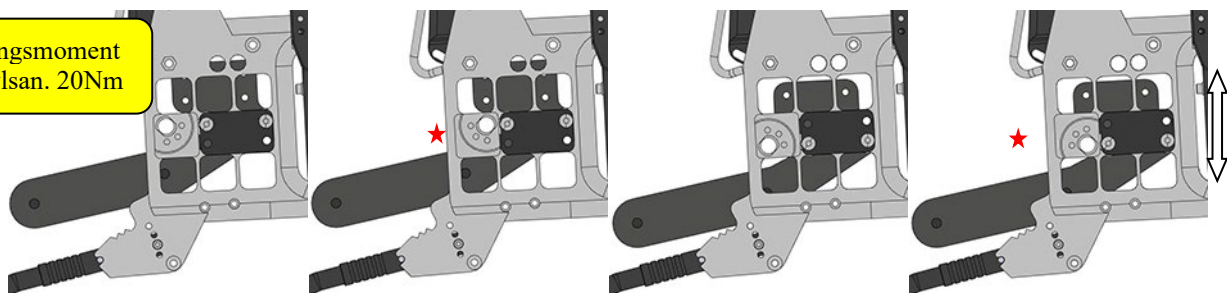

Plåtens placering vid montering med 24" hjul.

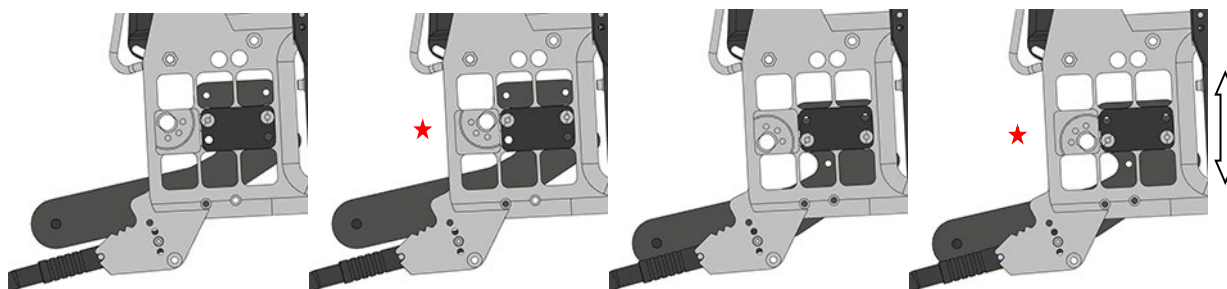

Plåtens placering vid montering med 26" hjul.

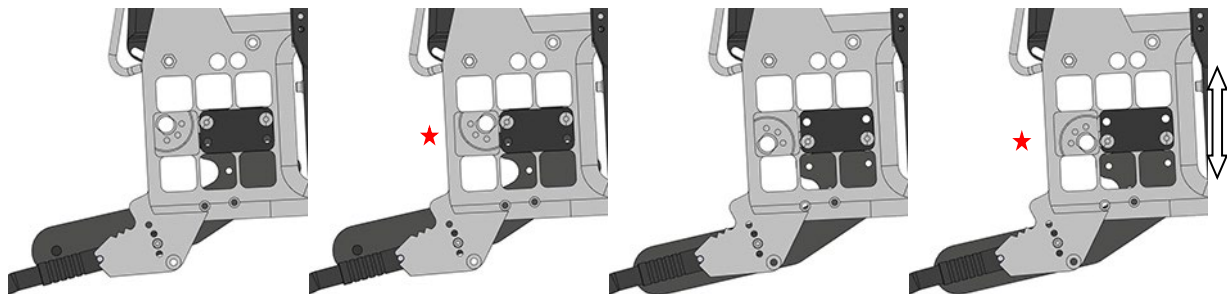

★ Navhylsan är ej möjlig att montera i dessa positioner.



Innan utrustningen tas i bruk skall styrkontrollens gashandtag och dess övriga leder inte tar i eller ligger emot någonstans. Om reglage tar i eller ligger emot så kan detta leda till att gasen hänger sig och en olycka kan inträffa.

**Om inget annat specificeras, använd följande åtdragningsmoment.
Unless otherwise specified, use the following tightening torque.**

Metrisk grovgängor, stål.
Metric coarse threads, steel.

<i>Gänga / Thread</i>	<i>Åtdragningsmoment / Tightening torque</i>
M3	1,2 Nm
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm