



**Monteringsanvisning Avantgarde 4 DV
MEM6343 och MEM6344**

1. Demontera hjulen på båda sidorna.

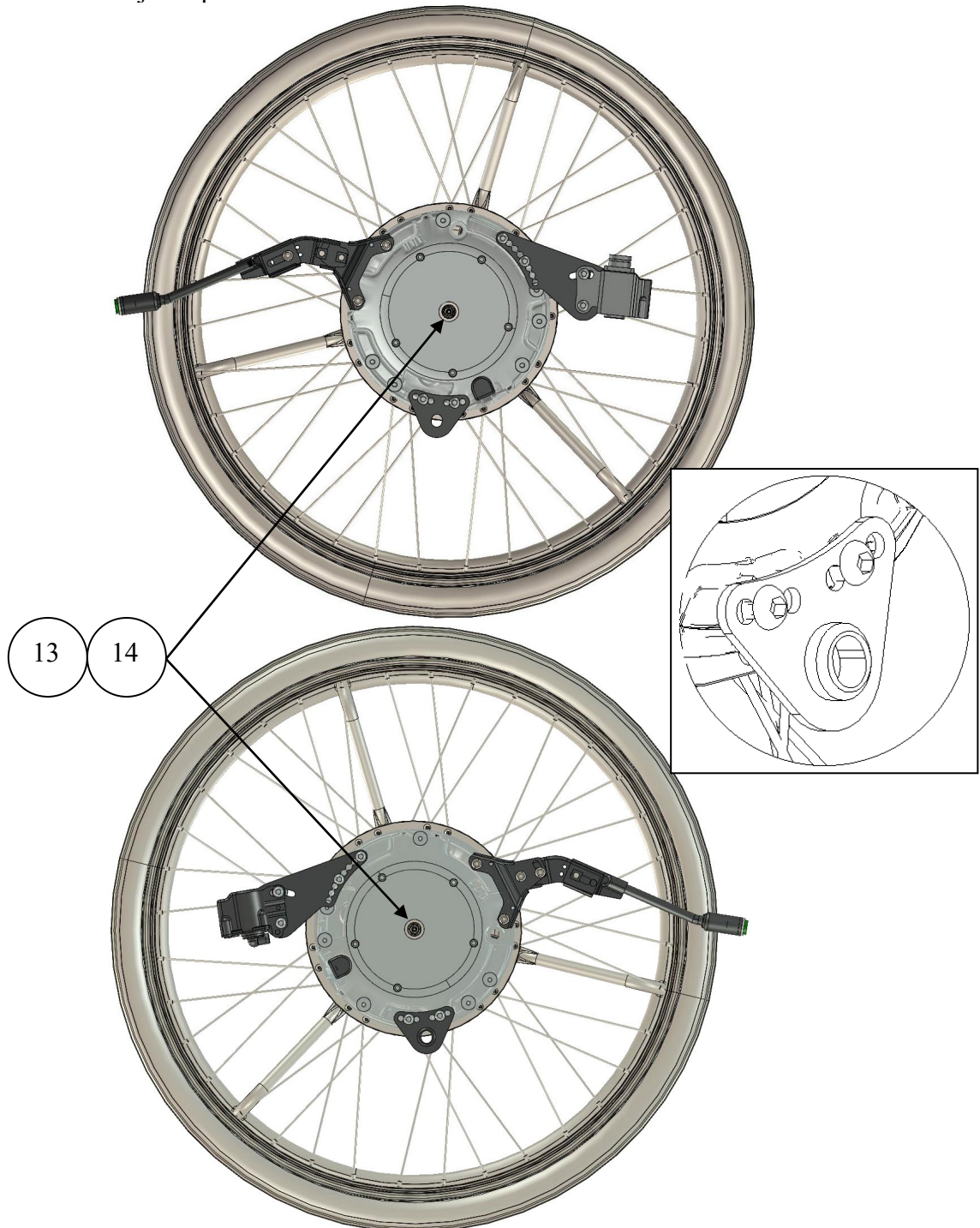

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
- Axel Ø12,0 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-B0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.

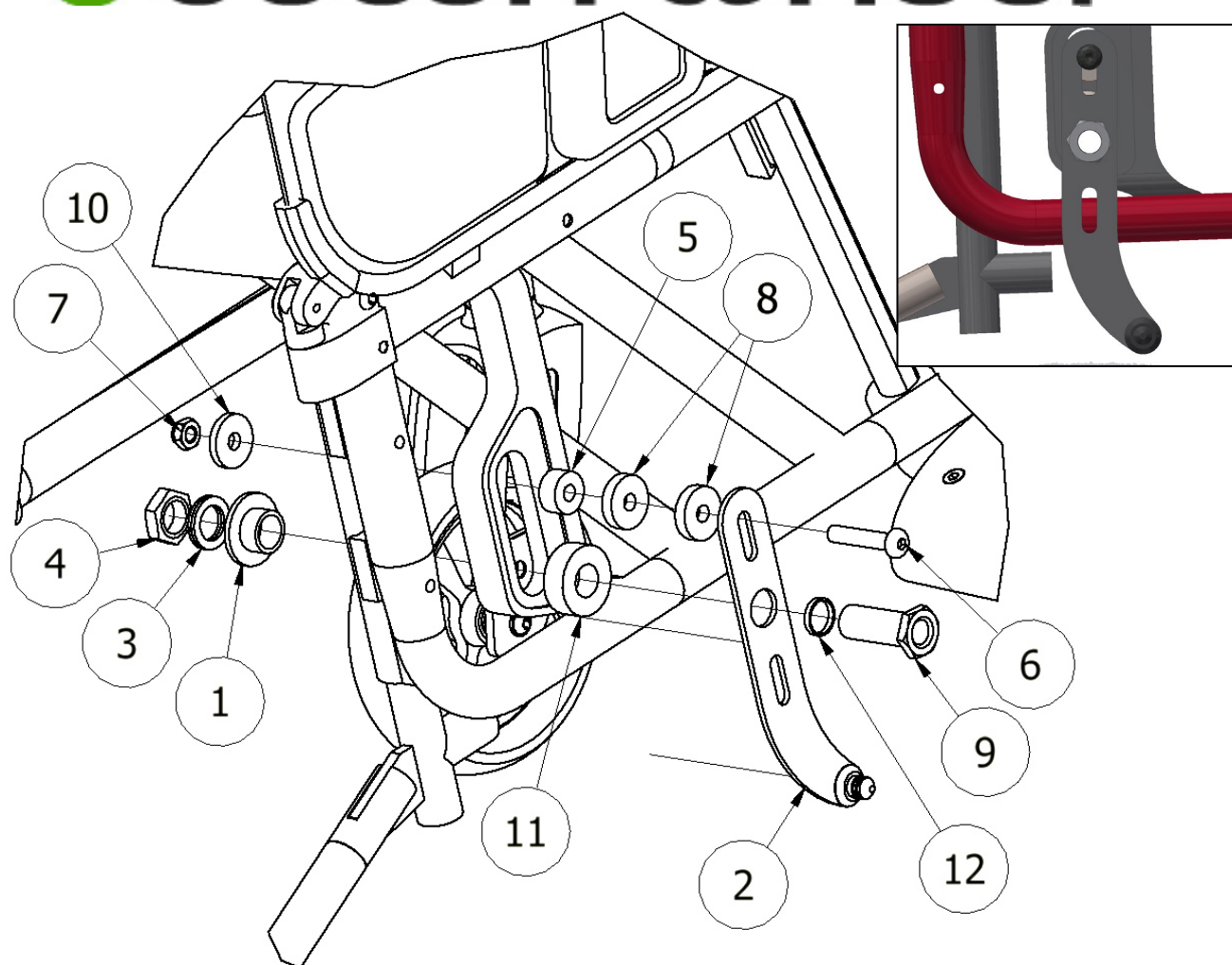

För montering på höger sida, så skall följande ingå.

Placering.	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	100 400 088	1	Distans
2	310019R	1	Höger Fäste
3	405239	1	Nordlock Bricka M16
4	XSM16M	1	Mutter M16 låg
5	100 400 089	1	Distans
6	XSM8X40	1	Skruv M8 x 40
7	XSM8ML	1	Låsmutter M8
8	100 400 012	2	Distans
9	HW063	1	Navhylsa
10	100 400 011	1	Distans
11	100 400 096	1	Distans
12	100 400 017	1	Distans
13	XOE-25383-00	1	Distans 12,0
14	93440-120520	1	Circlip

OBS! Vid separat köp av monteringsats **medföljer ej** axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

3. Montera nu den rygghängda batteriväskan.