

Yomper +

Kompletterande Monteringsanvisning kryssramstol


ETAC Cross 5 & Cross 6

YOM3103-YOM3104-YOM3105


v1.0 - 11/03/2022



På bilden nedan kan du se de positioner (röda kryss) som inte går att använda.

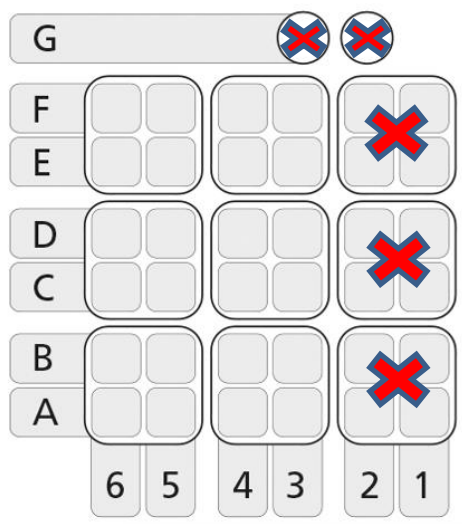


Cross 5

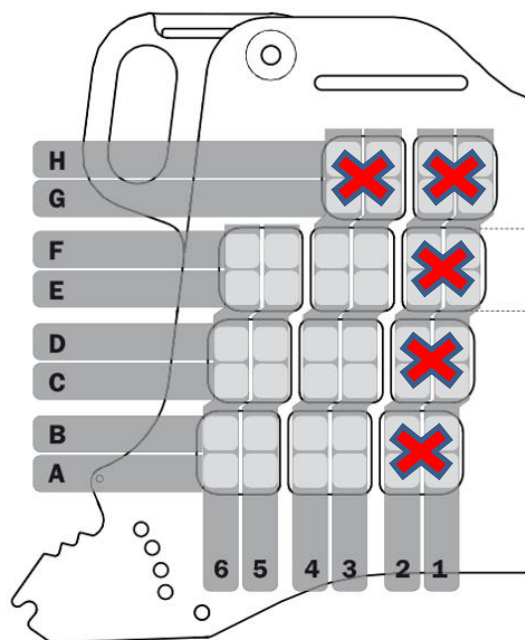


Cross 6


Installera de specifika delarna för ETAC Cross 5 (i rött nedan)

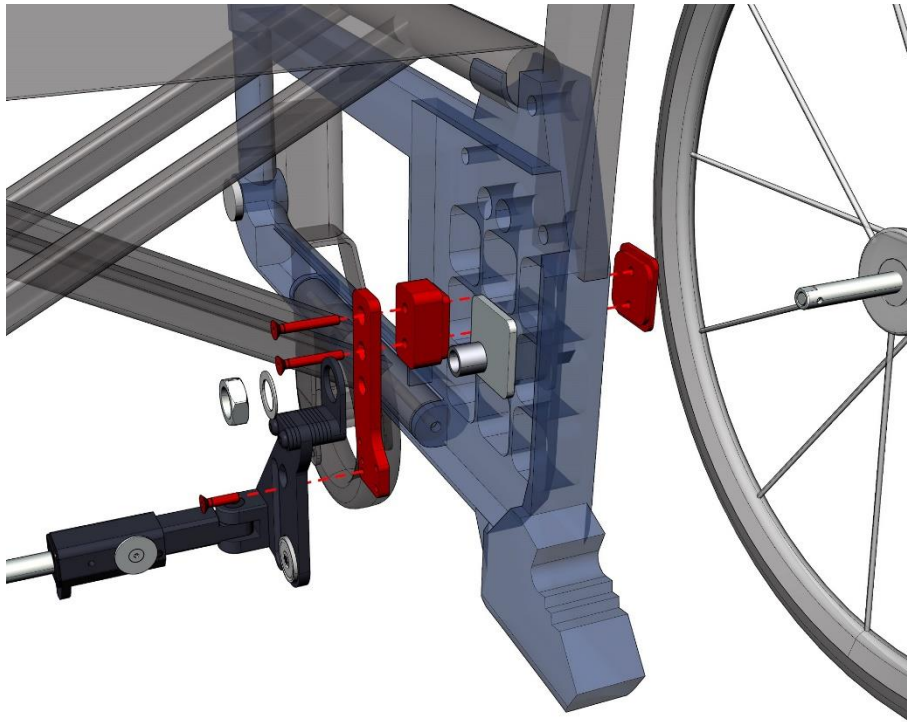


Dessa röda delar ersätter klämmorna som används på standardmonteringsfästet för hopfällbara ramrullstolar (i rött nedan):

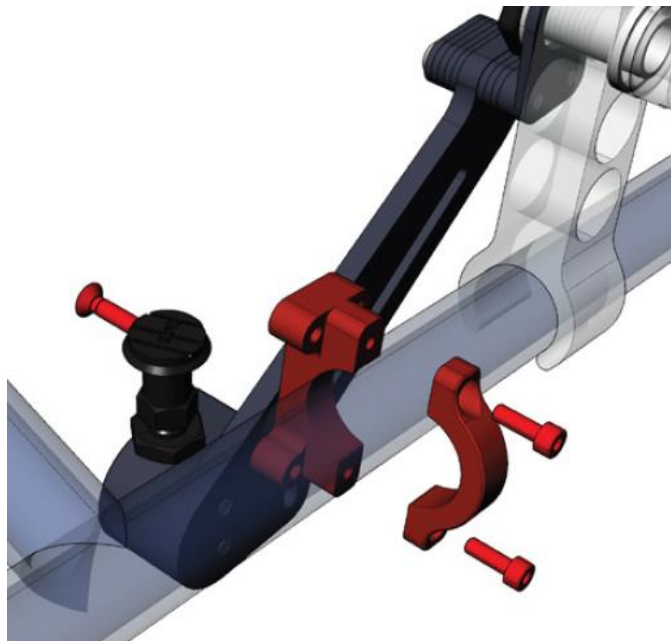



Övriga steg: se; Monteringsanvisning Yomper kryssramstolar

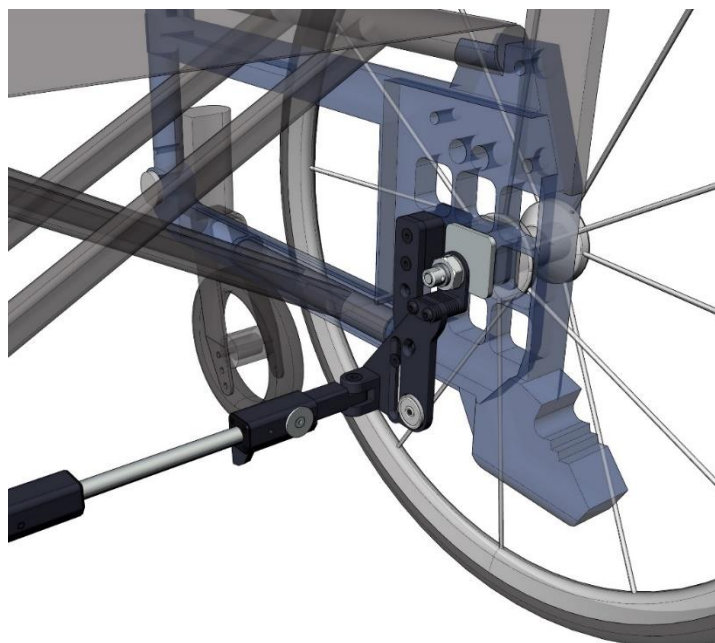


När det är installerat: Kontrollera höjden på stången: den måste vara 190 mm:

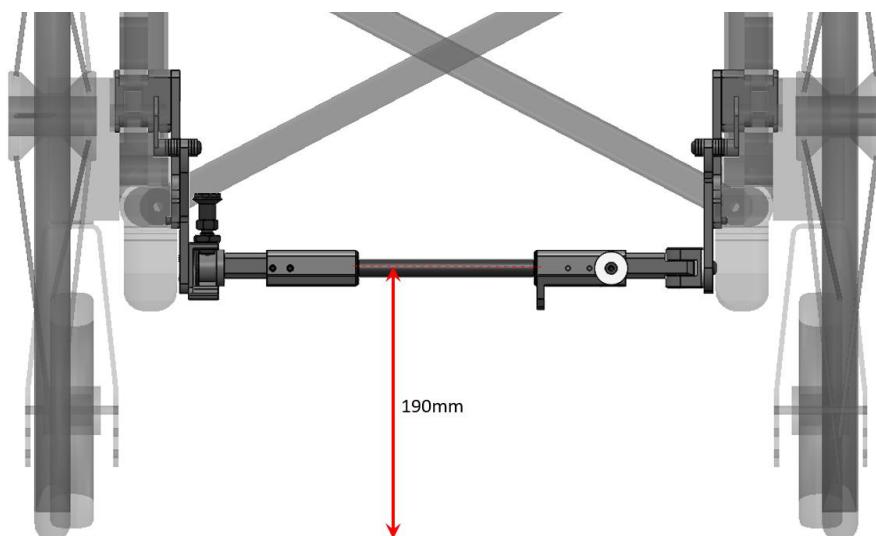

Innan användning

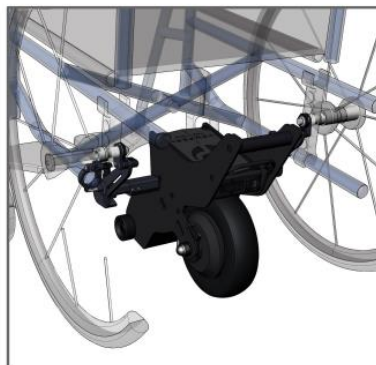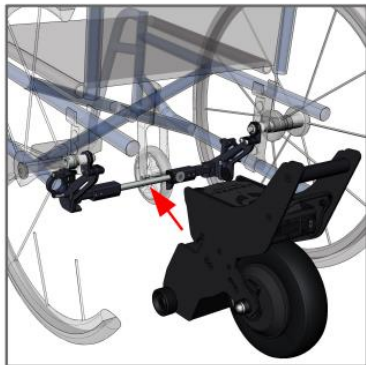

Kontrollera med Yomper påmonterad, att adaptern är ordentligt fastsatt och att stödet är styvt.

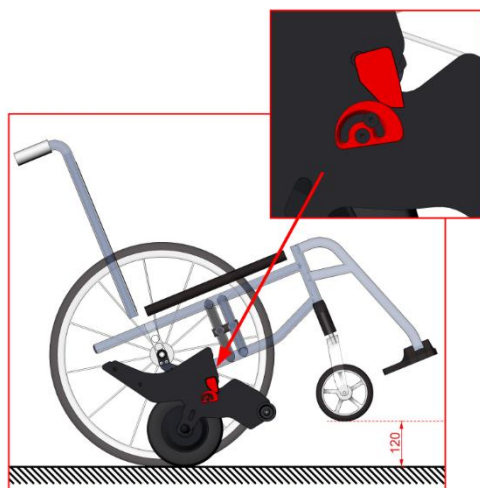

Innan du använder Yomper

Kontrollera justeringen av Yomper- stop pinnen.

Stoppet förhindrar att Yomper tippas rullstolen bakåt.

Yomperns stoppinne och monteringsfästet måste komma i kontakt med varandra när stolens framhjul är upplyfta 120 mm.